



MEDintim
personal healthcare



Nowość

Z filmem
animowanym
na DVD

ACTIVE Erection System^{NT}®

Aparat próżniowy wspomagający erekcję przy zaburzeniach erekcji

Regulowany elektronicznie, z osłoną przeciwbryzgową, łatwy do czyszczenia

Zastosowanie:

ACTIVE Erection System^{NT}® to medyczny środek pomocniczy służący do osiągnięcia wzwodu. Pompa próżniowa wytwarza podciśnienie w cylindrze wokół prącia. Powoduje to wypełnienie ciał jamistych krwią oraz prowadzi do usztywnienia członka. Teraz należy nasunąć jeden z pierścieni zatrzymujących krew na trzon prącia. Po zdjęciu cylindra zapobiega on odpływowi krwi i dzięki temu utrzymuje wzwód. W ten sposób zachowana erekcja umożliwia normalny i zaspokajający stosunek płciowy.

ACTIVE Erection System^{NT}® można łatwo czyścić ciepłą wodą. Wszystkie części, również pierścienie zatrzymujące krew, dostępne w czterech różnych rozmiarach, można zamawiać również po latach. 2 lata gwarancji obowiązuje na głowicę pompy (silnik). Wszystkie części można przechowywać w dołączonej torbie.

ACTIVE Erection System^{NT}® jest uznanym przez kasy chorych środkiem pomocniczym i może być przepisany przez lekarza.

Częste przyczyny zaburzeń erekcji to:

- cukrzyca (zwiększenie stężenia glukozy we krwi)
- nadciśnienie tętnicze krwi
- choroby naczyń krwionośnych (arterioskleroza)
- podwyższone wartości lipidów we krwi
- depresja (lub inne choroby psychiczne)
- choroby neurologiczne (stwardnienie rozsiane, porażenia poprzeczne)
- operacja prostaty
- choroby naczyń krwionośnych ciał jamistych prącia
- niewydolność nerek i wątroby
- zawał mięśnia sercowego i udar mózgu
- leki (np. przeciw nadciśnieniu krwi i zaburzeniom rytmu serca, obniżające poziom lipidów we krwi, przeciwpalne, antydepresyjne i odwadniające)
- palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu

ACTIVE Erection System^{NT}® składa się z następujących elementów:

- elektr. pompa próżniowa z trzema bateriami AAA
- cylinder
- prowadnica pierścieni zatrzymujących krew 1 i 2
- konus
- 4 różne pierścienie zatrzymujące krew (średnica wewnętrzna 10; 12,5; 15 i 20 mm)
- Sylk środek poślizgowy 50 ml butelka
- instrukcja użycia
- torba do przechowywania
- film animowany na DVD

PZN 8413888

Nr środka pomocniczego 99.27.02.0017

EAN: 4013273000116

Nr art.: AES 01

Made in Germany

CE 0483 Wyrób medyczny



Kessel Marketing & Vertriebs GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Moerfelden-Walldorf, Germany

Tel. +49 (0) 6105 20 37 20
Fax +49 (0) 6105 45 59 01
Email: service@medintim.de



www.medintim.de