



MEDintim
personal healthcare



Contragel grün®

Gel zur Verhütung mit Diaphragmen oder Portio-Kappen.

Contragel grün® bildet mittels der Methylzellulose eine mechanische Barriere vor dem Muttermund und verringert den pH-Wert. Die Spermien werden immobilisiert. Der Muttermund (Zervix) wird verschlossen (verklebt). Ein bewährtes Diaphragmagel, das in dieser Zusammensetzung seit 1972 hergestellt und angewandt wird.

Anwendung

Vor dem Einführen des Diaphragmas oder der Portio-Kappe geben Sie ca. einen Teelöffel voll (3 ml) **Contragel grün®** in das Diaphragma oder die Portio-Kappe. Beachten Sie hierzu auch die Gebrauchsanweisung Ihres Diaphragmas oder Ihrer Portio-Kappe.

Hinweis

– wasserlöslich und verträglich mit Kondomen

Inhaltsstoffe:

- Wasser
- Milchsäure
- Natriumlactat
- Methylzellulose
- Sorbinsäure

Inhalt

60 ml Gel

Lagerung

Kühl und trocken lagern.

Hersteller

DeltaMed GmbH, Raiffeisenstr. 16,
61169 Friedberg, Germany

Verkauf über den Fachhandel und in Apotheken.
PZN 0761621

EAN 40 13273 000208

CE 0124 Medizinprodukt



Kessel Marketing & Vertriebs GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20
Fax (06105) 45 59 01
E-Mail: service@medintim.de



www.medintim.de