



Contragel grün/green®

Gel contraceptivo para diafragmas o capas cervicales

Contragel grün/green® es un gel anticonceptivo natural, transparente que forma una barrera mecánica ante el orificio uterino y reduce el valor ph. Los espermatozoides se inmovilizan. El gel en combinación con el diafragma o capa cervical cierran el cuello uterino (cérvix) y el gel lo sella (pegándolo). La composición de este gel para diafragmas ha sido producida y utilizada desde el año 1972.

Forma de Usar

Antes de insertar el diafragma o capa cervical aplique una cucharadita (3 ml) de **Contragel grün/green®** en la parte interna del diafragma o capa cervical. Lea también cuidadosamente las instrucciones de uso de su diafragma o de su capa cervical.

Advertencia

Es compatible con diafragmas o capas cervicales de latex o silicona. Es a base de agua y compatible con condones de latex o silicona

Ingredientes:

- Agua
- Ácido lactic
- Sodio lactato
- Metil celulosa
- Ácido sórbico

Contenido:

60 ml

Almacenamiento:

Guardar en un lugar seco y fresco

Fabricante:

DeltaMed GmbH, Raiffeisenstr. 16,
61169 Friedberg, Germany

EAN code : 40 13273 000208

 0124 Dispositivo médico

