

Vorteile der FemCap®

- Sicher und ohne Nebenwirkungen
- Wirksam und bequem
- Praktisch und einfach in der Anwendung
- Natürliche Methode (hormonfrei)
- Sexuelle Empfindungen und Gewohnheiten beider Partner werden nicht beeinträchtigt
- Auch während der Stillzeit (Laktation) anwendbar
- Einlegen: bis zu 2 Stunden vorher, aber immer vor dem Verkehr. Sie muß vor der sexuellen Erregung eingesetzt werden.
- kann bis zu 48 Stunden liegen bleiben
- Ökonomisch, da wiederverwendbar (für mind. 1 Jahr)

Bei weiteren Fragen, wenden Sie sich an Ihre/n Ärztin/ Arzt oder schreiben uns an service@medintim.de

Empfehlung:

Als Gel zur Anwendung mit der FemCap® empfehlen wir **Contragel grün®**, 60ml. Erhältlich in Apotheken. PZN 0761621

Inhaltsstoffe:
Medizinisches Silikon

Farbe:
transparent

Hersteller:
FemCap Inc.,
14058 Mira Montana
Dr. Del Mar,
CA 92014, USA



0050 Medizinprodukt



Import und Vertrieb:
Kessel Marketing & Vertriebs GmbH
Kelsterbacher Strasse 28
D-64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. +49 (0) 6105 20 37 20
Fax +49 (0) 6105 45 59 01
E-Mail: service@medintim.de

Lieferbare Größen:

(Angabe des Innendurchmessers)

Klein (22 mm)

(für Frauen, die noch nicht entbunden haben)

1er Set
PZN 6063131

Mittel (26 mm)

(für Frauen, die mit Kaiserschnitt entbunden haben oder einen Abbruch hatten.)

1er Set
PZN 6063148

Groß (30 mm)

(für Frauen, die vaginal entbunden haben)

1er Set
PZN 6063154




FemCap®

Portiokappe aus Silikon zur Empfängnisverhütung

Die natürliche und hormonfreie Familienplanung für gesundheitsbewusste Frauen

www.medintim.de

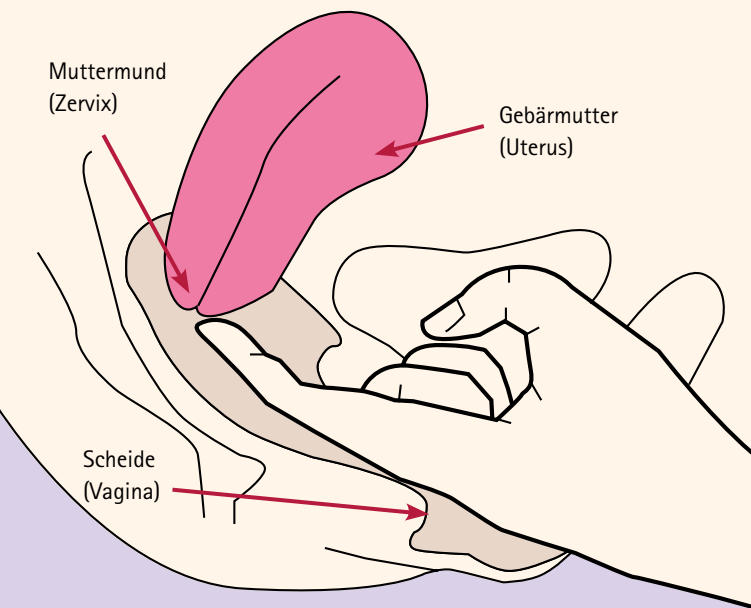


Wichtig vor der ersten Anwendung:

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig
- Tasten Sie Ihren Muttermund (Zervix)
- Üben Sie selbst das Einlegen und Herausnehmen
- Schauen Sie sich den Film im Internet an.
femcap.medintim.de

(Gerne senden wir Ihnen den Film als DVD zu, falls Sie ihn nicht über das Internet sehen können.)

Sie können auch Ihre/n Gynäkologin/en einmal prüfen lassen, ob Sie die FemCap® richtig eingesetzt haben.

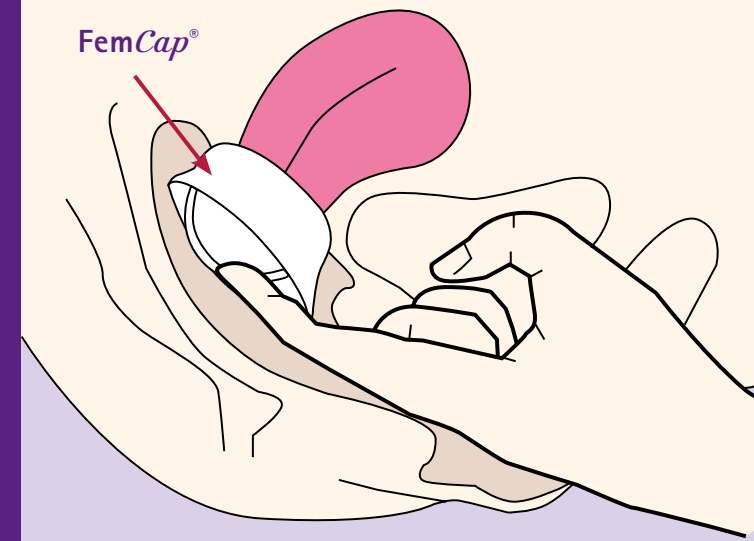

vorher medizinisch abklären:

A) **Vaginale Untersuchung** zur Klärung der Größe des Muttermundes (Zervix) und Ausschluss von speziellen Anomalien an der Zervix (siehe Abbildung oben)

B) **Bestimmung der FemCap® Größe** entsprechend der persönlichen Vorgeschichte und Untersuchung.

- Klein 22 mm: noch nie schwanger gewesen
 Mittel 26 mm: bereits einmal schwanger gewesen, nach Fehlgeburt, nach Kaiserschnittentbindung, oder nach Schwangerschaftsabbruch vaginal entbunden
 Groß 30 mm: vaginal entbunden



C) **Richtige Lage der FemCap® prüfen.**



Üben Sie das Einlegen der FemCap®, damit die Anwendung einfacher wird.

- 1) Während der Anlernzeit können Sie als zusätzlichen Schutz (für wenige Tage) Ihre angebrochene Pillenpackung verwenden oder Sie verhüten zusätzlich mit einem Kondom.
- 2) Wichtig: Die FemCap® muss vor der sexuellen Erregung eingelegt werden.
- 3) Geben Sie das Gel immer in die Krempe der FemCap®.
- 4) Nach dem Geschlechtsverkehr muss die FemCap® mind. 6 Stunden liegen bleiben. Danach kann Sie herausgenommen, gereinigt und aufbewahrt werden.
- 5) Sollten Sie die FemCap® einmal vergessen oder nicht richtig eingesetzt haben, nehmen Sie in diesem Fall sofort die „Pille danach“ als „Notfallkontrazeption“.
- 6) Sehen Sie sich den Anwendungsfilm (DVD) in Ruhe an. Achten Sie genau auf die Schritte beim Einlegen und Herausnehmen.