

## Sécheresse vaginale : les causes

De nombreuses femmes n'aiment guère en parler, alors que ce problème et ses conséquences, parfois importantes, sont faciles à résoudre !

Différentes causes peuvent provoquer la sécheresse vaginale :

- des changements hormonaux, par exemple pendant l'allaitement
- les effets de la ménopause, par exemple chez les femmes qui ne prennent pas d'hormones
- le stress et ses différentes raisons
- les effets secondaires d'une chimiothérapie

La sécheresse vaginale peut être très désagréable au quotidien. Elle entraîne des irritations, des douleurs et même des fissures de la paroi vaginale, susceptibles de provoquer des démangeaisons et des inflammations. Grâce à **Hyalofemme™**, il est possible d'éviter toutes les conséquences de la sécheresse vaginale.

La vie sexuelle du couple peut également souffrir d'un vagin trop sec. Dans de tels cas, le gel vaginal **Hyalofemme™** agit immédiatement et efficacement. Il est aussi possible d'utiliser le gel vaginal Hyalofemme à tout moment comme gel lubrifiant.

Le gel vaginal **Hyalofemme™** réhydrate le vagin et apporte une aide durable. Pour les femmes qui ne prennent pas d'hormones pendant la ménopause, le gel vaginal **Hyalofemme™** est un remède efficace pour faire face aux altérations de la paroi vaginale durant cette phase de la vie.

## Comment agit Hyalofemme®?

L'agent actif d'**Hyalofemme™** est l'Hydéal™ et se compose à cent pour-cent d'un dérivé de l'acide hyaluronique. Cette substance affine au corps humain favorise la guérison des petites lésions de l'épithélium vaginal.

Elle permet de rééquilibrer l'humidification du vagin ainsi que son élasticité qui peuvent être toutes deux altérées par un manque d'œstrogène.

Des études récentes ont révélé que l'Hydéal™ permet de ralentir la croissance du *Candida Albicans*, l'agent infectieux le plus fréquent de la mycose vaginale.

Vous trouvez davantage d'informations sur :  
[www.secheresse-vaginale.fr](http://www.secheresse-vaginale.fr)

**Fabricant :**  
Fidia farmaceutici SpA

**Distributeur en France :**  
BIVEA Sarl

Av. Ferd. de Lesseps  
33610 Canéjan  
Tél. 05 57 26 09 00  
Fax: 05 57 26 53 48  
info@bivea.com

[www.bivea-medical.fr](http://www.bivea-medical.fr) (Pro santé)  
[www.bivea.fr](http://www.bivea.fr) (Vente Public)

**Composition :**  
Hydeal-D, Methyl p-hydroxybenzoate, Propyl p-hydroxybenzoate, Hydroxyde de sodium, eau purifiée

**Hyalofemme™**  
Tube de 30 grammes et applicateur  
Le produit peut être commandé directement chez nous, acheté en commerce spécialisé et en pharmacie.



0459 Produit médical



# Hyalofemme®

## Gel vaginal

sans hormones  
améliore la guérison  
soulage rapidement

[www.secheresse-vaginale.fr](http://www.secheresse-vaginale.fr)

  
**MEDintim**  
personal healthcare



## Hyalofemme® - Gel vaginal

- Sans hormones
- Bonne tolérance, exempt d'effets secondaires
- Revitalise les parois vaginales
- Améliore l'humidité du vagin
- Favorise la guérison des fissures de la paroi vaginale
- Soulage rapidement
- Incolore et inodore
- Facile à utiliser (grâce à l'applicateur)
- Testé en clinique
- Compatible avec l'utilisation de préservatifs (latex)
- Sécheresse vaginale interne et externe

## Sécheresse vaginale et les possibilités d'y remédier :

L'agent actif du gel vaginal **Hyalofemme**™ est une substance affine au corps humain, l'acide hyaluronique également utilisé dans la fabrication de produits cosmétiques, le traitement de brûlures et les lésions du genou.

**Hyalofemme**™ réactive et régénère l'épithélium de la paroi vaginale. Il active l'équilibre hygrométrique et les fissures guérissent rapidement.

Le gel vaginal **Hyalofemme**™ peut être également utilisé comme gel lubrifiant pour l'acte sexuel. Il est compatible avec l'usage de préservatifs et d'autres produits en latex fabriqués à base de caoutchouc naturel.

Le gel vaginal **Hyalofemme**™ a également fait ses preuves en cas de sécheresse du vagin suite à une chimiothérapie.

## Hyalofemme® - facile à appliquer

Tous les trois jours introduisez, au moyen d'un applicateur, une quantité de 3 ml d'**Hyalofemme**™ dans votre vagin.

Le conditionnement (tube de 30 ml) permet l'application du produit pendant environ un mois, ce qui, dans de nombreux cas, est déjà suffisant. Si le problème est récurrent, il est possible de répéter à tout moment l'application du gel vaginal Hyalofemme.

**Le gel vaginal Hyalofemme**™ est incolore et inodore. Quelques applications suffisent pour une bonne efficacité.

Le gel vaginal **Hyalofemme**™ a été testé en clinique. Le fabricant, la société F.A.B. Fidia sise à Abano Terme (Italie), dispose de dizaines d'années d'expérience de la fabrication et de l'application de l'acide hyaluronique.

Depuis plusieurs années, nous avons eu un retour positif de femmes qui ont utilisé **Hyalofemme**™ dans différents pays européens. Des femmes de tous âges, de même que les gynécologues ne cessent de confirmer l'effet rapide du gel vaginal **Hyalofemme**™