


ACTIVE

Erection System^{NT}[®]

Medizinische und praktische
Fragen zur Anwendung

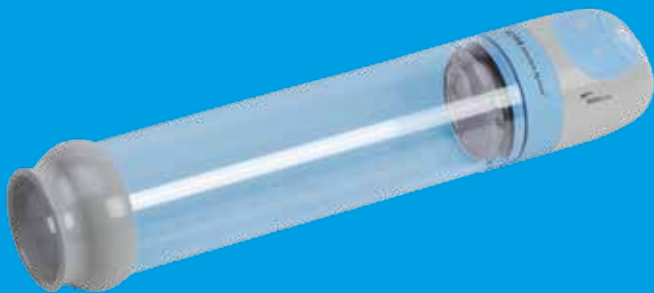

MED*intim*

personal healthcare

Medizinische Fragen zur Anwendung

1 Kann jeder Mann das ACTIVE *ErectionSystem*^{NT}® benutzen?

Das ACTIVE *ErectionSystem*^{NT}® ist für Männer jeden Alters geeignet. Es hilft dabei eine Erektion zu erlangen und diese dann auch halten zu können.

2 Kann ich das ACTIVE *ErectionSystem*^{NT}® bei Diabetes anwenden?

Ja, insbesondere bei Diabetikern ist es ein besonders erfolgreiches Hilfsmittel, da andere Methoden oft nicht weiterhelfen können.

3 Kann ich das ACTIVE *ErectionSystem*^{NT}® bei Bluthochdruck anwenden?

Ja, da Männern, die Blutdrucksenker einnehmen, die Vakuumpumpe besonders gut hilft, wieder eine Erektion zu erlangen. Das Gerät wird daher in der Regel auch von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet. Ihr Arzt kann Ihnen hierzu ein Hilfsmittelrezept ausstellen.

4 Kann ich das **ACTIVE *ErectionSystem*^{NT}** bei der Einnahme von Blutverdünnern (z.B. Makumar®) anwenden?

Im Prinzip ja, da die Anwendung einer Vakuumpumpe kein gesundheitliches Risiko für die Anwender von blutverdünnenden Medikamenten darstellt. Sie sollten allerdings damit rechnen, dass es zu (starken) Blutergüssen kommen kann, die evtl. auch einer weiteren Anwendung der Vakuum-Erektionshilfe entgegenstehen. Ein ernster oder dauerhafter Schaden kann dadurch nicht entstehen.

5 Kann ich das **ACTIVE *ErectionSystem*^{NT}** nach einer Bestrahlung (Prostata) anwenden?

Ja, auch nach einer Strahlenbehandlung der Prostata ist die Anwendung einer Vakuumpumpe wie das **ACTIVE *ErectionSystem*^{NT}** hilfreich und wirksam. Das Gerät wird in der Regel auch bei dieser Erkrankung von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet. Ihr Arzt kann Ihnen hierzu ein Hilfsmittelrezept ausstellen.

6 Kann ich das **ACTIVE *ErectionSystem*^{NT}** nach einer radikalen Prostatektomie anwenden?

Ja. Die Erfahrung hat allerdings gezeigt, dass das **MANUAL *ErectionSystem***® insbesondere bei dieser Indikation besser hilft als das mit Batterie betriebene **ACTIVE *ErectionSystem*^{NT}**®. Diese Vakuumpumpe baut den Unterdruck etwas stärker und rascher auf. Wir beraten Sie hierzu gerne. Das Gerät wird in der Regel bei dieser Erkrankung auch von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet. Ihr Arzt kann Ihnen hierzu ein Hilfsmittelrezept ausstellen.

7 Hilft die Vakuumpumpe bei der Heilung nach einer Prostata OP?

Ja, nach einer Prostata Operation kann die Anwendung mit der Vakuumtherapie zum besseren Heilerfolg beitragen. Zweimal täglich kann der Penis für einige Minuten im Zylinder von Unterdruck umgeben werden. Das fördert die Durchblutung und führt nachweislich mehrerer Studien zum rascheren Heilerfolg, später besseren Erektionen und kürzerer Belastungen mit Inkontinenz. Die erstmalige Anwendung eines Stauringes zum Halten der Erektion für Sex, sollte frühestens vier Wochen nach der Operation versucht werden.

8 Seit meiner Prostataentfernung habe ich manchmal Probleme den Urin zu halten. Kann ich trotzdem eine Vakuumpumpe anwenden?

Ja, wir empfehlen in diesem Fall das **MANUAL *ErectionSystem*^{NT}**, da dieses Gerät sich einfacher reinigen lässt, falls es beim Pumpen zu einem Austritt von Urin in den Zylinder kommt.

9 Gibt es mit der Anwendung der Vakuumpumpe ein erhöhtes Thromboserisiko?

Nein, die Anwendung der Vakuumtherapie hat keinen Einfluss auf Ihr Thromboserisiko.

10 Kann ich das **ACTIVE *ErectionSystem*^{NT}** anwenden, obwohl ich schon über 70 Jahre alt bin?

Ja selbstverständlich. Wir haben viele Kunden die sogar über 80 Jahre alt sind. Unser ältester Kunde, den wir selbst gesprochen haben, war 92 Jahre jung. Sexualität hat keine Altersgrenzen. Die Vakuumpumpen sind hierbei ein einfaches und praktisches Hilfsmittel.

11 Kann ich das **ACTIVE *ErectionSystem*^{NT}** bei einer Penisverkrümmung (Induratio Penis plastica, IPP, Peyronie-Krankheit) anwenden?

Ja, falls die Penisverkrümmung das Einführen in den Zylinder nicht unmöglich macht. Wir haben mehrfach positive Rückmeldungen von Patienten, dass sich die Penisverkrümmung bei regelmäßiger Anwendung verringert hat.

12 Kann ich das **ACTIVE *ErectionSystem*^{NT}** bei leichter Parkinson Erkrankung anwenden?

Ja, die Anwendung einer Vakuumpumpe bei Parkinson Erkrankung ist möglich.

13 Kann ich bei MS (Multiple Sklerose) eine Vakuumpumpe benutzen?

Bei dieser neurologischen Erkrankung kommt es häufig zu Erektionsschwächen, fehlenden Orgasmen oder zum Ausbleiben der Ejakulation. Die Anwendung des **ACTIVE *ErectionSystem*^{NT}** kann grundsätzlich helfen, diese Probleme zu lösen. Eine Vakuumpumpe kann benutzt werden.

14 Bei welchen Krankheiten darf man das **ACTIVE *ErectionSystem*^{NT}** (Vakuumpumpe) nicht anwenden?

Bei Sichelzellenanämie, Leukämie, Knochenmarktumoren oder anderen Erkrankungen, die eine veränderte Blutgerinnung zur Folge haben und die zu Blutungen und verlängerten Erektionen führen. Und falls es medizinische Gründe gibt, keine sexuelle Aktivität auszuführen.

15 Nach der Anwendung habe ich einen Bluterguss am Penis. Ist das gefährlich?

Nein, das kann vorkommen und ist häufig bei Diabetikern zu beobachten. Der Bluterguss verschwindet spätestens nach ein paar Tagen.

16 Wie oft kann ich das ACTIVE *Erection System*^{NT}® benutzen? Auch mehrmals am Tag?

Sie können das Gerät so oft benutzen, wie Sie es wünschen. Es besteht keine Verletzungsgefahr.

17 Kann ich zu viel Unterdruck erzeugen oder mich bei der Anwendung verletzen?

Nein, das Gerät ist nach oben in der Leistung abgeriegelt und Sie können sich nicht verletzen.

18 Manchmal zieht es etwas bei der Anwendung. Das ist unangenehm.

Nehmen Sie eine schwächere Stufe am Gerät (Drücken auf Minus) und lassen vielleicht etwas Luft einströmen (Einlassknopf in der Mitte). Eine langsam gebildete Erektion mit der Vakuumpumpe ist qualitativ besser.

19 Habe ich mit der Erektion des ACTIVE *Erection System*^{NT}® normalen Sex mit einem Orgasmus?

Ja, Sie können mit der künstlich gebildeten Erektion bis zu einer halben Std. (30 Min.) normal Sex haben oder auch masturbieren. Dabei kann es wie früher zum Höhepunkt (Orgasmus) kommen.

20 Habe ich bei der Anwendung der Vakuumpumpe noch einen Samenerguss?

Der Samenerguss erfolgt, das Ejakulat wird durch den Stauring vom Austritt abgehalten. Nach dem Abziehen des Staurings fließt das Ejakulat aus. Ein äußerlich sichtbares „Abspritzen“ beim Höhepunkt ist nicht möglich.

21 Schadet es nicht, dass das Ejakulat beim Orgasmus nicht austreten kann?

Nein, die Gefäße können es speichern und später abgeben.

22 Kann ich trotz Anwendung des ACTIVE *Erection System*^{NT}® ein Kind zeugen?

Falls Sie ein Kind zeugen wollen, können Sie hierzu einen speziellen Ring benutzen: den **ACTIVE LoopRing**[®] (ALR). Dieser Ring kann nach dem Höhepunkt mit einem kleinen Handgriff geöffnet werden, so dass das Ejakulat in die Vagina fließen kann, während der Penis noch in der Scheide ist. Falls Sie kein Kind zeugen wollen sind die Stauringe **kein** sicheres Verhütungsmittel, das als solches angewandt werden sollte.

23 Kann es sein, dass mein Penis durch die Vakuumpumpe größer ist als früher?

Dieser Eindruck kommt vermutlich davon, dass Sie über längere Zeit keine richtige oder ausreichende Erektion hatten. Durch die Anwendung der Vakuumpumpe wird die Durchblutung des Penis gefördert. Dadurch kann sich seine Größe besser herstellen, als bei schlechterer Durchblutung.

24 Ich benutze die sog. SKAT Methode, d.h. ich spritze ein Medikament in den Penisschaft. Kann ich trotzdem auch das ACTIVE *ErectionSystem*^{NT}® nutzen?

Ja, es gibt viele Anwender dieser medikamentösen Methode zur Behandlung von Erektionsschwächen, die zunächst das ACTIVE *ErectionSystem*^{NT}® zum Aufbau der Erektion nehmen, um dann in den bereits gut durchbluteten, erigierten Penis die „Skat“ Spritze zu setzen. Dabei verteilt sich dieses Medikament dann besser in den Schwellkörpern.

25 Meine Partnerin findet, dass mein Penis sich kälter anfühlt seitdem wir die Pumpe benutzen?

Ja, dies kann sein, da die Durchblutung durch den künstlichen Blutstau mit den Erektionringen verringert ist. Lösung: Sie können vorher ein wärmendes Gel auftragen oder den Penis kurz mit heißen Tüchern oder einer Wärmflasche einhüllen.

Praktische Fragen der Anwendung

26 Ich kann das ACTIVE *ErectionSystem*^{NT}® nicht zusammensetzen?

Schauen Sie sich nochmals die einzelnen Schritte in der Gebrauchsanweisung an. Haben Sie die beigelegte DVD angeschaut? Falls es nicht funktionieren sollte, helfen wir Ihnen gern telefonisch weiter: + 49 6105 203720.

27 Das Gerät funktioniert nicht. Was kann ich tun?

Prüfen Sie zunächst, ob alle drei Batterien richtig eingelegt sind. Prüfen Sie, ob alle drei Batterien voll und geladen sind.

28 Was kann ich machen: Der Motor läuft, aber das Gerät macht keinen Unterdruck (saugt nicht).

Sie können selbst testen, ob der Motor richtig saugt. Halten Sie den Motor mit dem Zylinder auf eine flache Stelle am Körper, z.B. den Oberschenkel oder die Bauchdecke. Falls sich der Zylinder ansaugt und beim Entfernen „plopp“ macht, ist das Gerät in Ordnung. Versuchen Sie es nochmals am Penis und achten Sie dabei darauf, dass der Zylinder gut am Körper (Penisschaft) abschließt. Etwas Gleitmittel (z.B. SYLK) hilft, den Zylinder gut am Körper abzudichten. Wichtig: Möglichst Schamhaare entfernen!

29 Was kann ich machen: der Motor läuft, aber es gibt keinen Unterdruck?

Senden Sie uns den Motor zur Kontrolle in einem frankierten Päckchen ein. Sie haben zwei Jahre Gewährleistung. Absender nicht vergessen!

30 Der Motor stottert und die Lämpchen flackern. Was ist los?

Die Batterien sind leer. Bitte neue Batterien einlegen.

31 Wie kann ich den Motor vom Zylinder abnehmen, er löst sich nicht und sitzt fest?

Versuchen Sie es in einer Drehbewegung. Falls das nicht hilft, können Sie den Zylinder unter heißes Wasser halten und dann nochmals versuchen den Motor zu lösen. Falls dies nicht hilft können Sie uns den Motor mit dem Zylinder einsenden.

32 Bei mir hält die Erektion trotz Stauring nicht lange an?

Versuchen Sie es mit einem kleineren, engeren Stauring.

33 Die Erektion hält auch mit dem kleineren Stauring nicht lange an.

Es gibt die Möglichkeit zwei Stauringe gleichzeitig anzuwenden. Dazu gibt es extra hergestellte verlängerte Führungshülsen, die Sie auf der Ersatzteilliste finden. Wir beraten Sie hierzu gerne.

34 Beim Pumpen im Zylinder ist die Erektion noch gut, aber sobald ich den Stauring drüber geschoben habe, lässt die Erektion schon nach. Ich kann dann nicht richtig Sex machen.

Sie können sich mit einem Trick helfen und eine richtig feste Erektion durch „Nachpumpen“ erhalten. Nach dem Überstreifen des Stauringes nehmen Sie dazu nochmals die Pumpe. Entfernen Sie die grauen Führungshülsen vom Zylinder. Nun führen Sie nur die Pumpe mit dem Zylinder über den Penis, auf dem schon der Stauring sitzt. Pressen Sie den Zylinder gegen den Körper und erzeugen Sie nochmals Unterdruck um den Penis. Jetzt geschieht Folgendes: Blut wandert in den Penis, kann aber nicht zurück. Nach Entfernen des Zylinders wird nun die Erektion richtig fest sein und im rechten Winkel zum Körper abstehen.

35 Ich benutze die große Führungshülse, habe aber Probleme die Eichel aus dem Zylinder durch die große Führungshülse herauszuziehen, wenn der Penis erigiert ist?

Lassen Sie die Führungshülse ganz weg und spannen Sie den Stauring direkt auf den Zylinder auf. Dann müsste es klappen.

36 Wenn mein Glied erigiert ist, stößt die Eichel vorne an den Motor an. Gibt es einen längeren Zylinder?

Ja, es gibt einen um 5 cm längeren Zylinder, den Sie auf unserer Ersatzteilliste finden. Wir beraten Sie hierzu gerne.

37 Mein Penis füllt im erigierten Zustand den Zylinder voll aus und ich habe Schwierigkeiten ihn herauszuziehen? Gibt es einen größeren Zylinder?

Ja, hierzu bieten wir das "Special Plus System" an. Das ist ein extra großer und längerer Zylinder, der mittels Adapter auf den Motor passt. Wir beraten Sie hierzu gerne.

38 Mein ACTIVE *Erection System*^{NT®} wird immer schwächer beim Saugen, kann ich etwas tun?

Ja, es könnte sein, dass sich die weiße Membran am Motor zugesetzt hat. Dies kommt bisweilen vor, durch Gleitmittelreste. etc. Diese weiße Membran am Motor können Sie selbst vorsichtig reinigen: nehmen Sie ein Q-Tip und befeuchten dieses Wattestäbchen. Damit können Sie nun vorsichtig von außen diese Membran (aus „Goretex“[®]) säubern. Hinweis: nicht zu fest herangehen, da sonst die Membran beschädigt werden könnte. Falls dies kein Erfolg hat, können Sie den Motor zur Wartung einsenden.

CE 0483 Medizinprodukt



 **Hersteller und Vertrieb**

KESSEL medintim GmbH

Kelsterbacher Str. 28

D-64546 Mörfelden-Walldorf/Germany

Tel. +49 (6105) 20 37 20

Fax +49 (6105) 45 59 01

service@medintim.de

www.medintim.de