

Häufige Ursachen von Erektionsstörungen und Impotenz sind:

- Diabetes
- Bluthochdruck /Herz-Kreislaufkrankungen
- Operationen der Prostata
- Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose)
- Herzinfarkt und Schlaganfall
- erhöhte Blutfettwerte
- Depressionen oder andere seelische Erkrankungen
- neurologische Erkrankungen (z. B. Multiple Sklerose, Querschnittslähmung)
- Gefäßerkrankungen der Schwellkörper des Penis
- Nieren- oder Leberinsuffizienz
- Medikamente (z. B. gegen Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Blutfettsenker, Entzündungshemmer, Antidepressiva, zur Entwässerung)
- Rauchen
- übermäßiger Alkoholkonsum

Lösung: Bei diesen Erkrankungen ist die Vakuumtherapie eine effiziente, nebenwirkungsarme sowie einfach anzuwendende Alternative zur medikamentösen Therapie.

Vakuumerektionssystem bei erektiler Dysfunktion (Impotenz)

Die Vakuumtherapie sollte nicht angewendet werden bei:

- Sichelzellenanämie
- Leukämie
- Knochenmarktumoren

Die Vakuumtherapie sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewandt werden bei:

- starken Blutgerinnungsstörungen

Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder rufen uns hierzu an.

Bestellinformationen

ACTIVE *Erection System*^{NT}®



Pos. Nr. 99.27.02.0017
Apotheken PZN 08413888
EAN: 4013273000116
Art.-Nr. AES 01
Preis: 247,- €
CE 0483
Medizinprodukt

MANUAL *Erection System*®



Pos. Nr. 99.27.02.0022
Apotheken PZN 04605935
EAN: 4013273001175
Art.-Nr. MES 01
Preis: 235,85 €
CE
Medizinprodukt



KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
www.medintim.de

Tel. 06105 20 37 20
Fax 06105 45 59 01
E-Mail: service@medintim.de

www.medintim.de


MEDintim
personal healthcare

AKSNTIMES | 31.01.2017 | 02/17




Vakuumtherapie bei Erektile Dysfunktion (Impotenz)

ACTIVE *Erection System*^{NT}®
MANUAL *Erection System*®




Anwendung

Das **ACTIVE Erection System^{NT}** und das **MANUAL Erection System[®]** sind medizinische Hilfsmittel für die Vakuumtherapie bei erektiler Dysfunktion (Impotenz). Bei einer Vakuumtherapie wird die Erektion durch Unterdruck ermöglicht. Die Vakuumpumpe erzeugt einen Unterdruck im Zylinder um den Penis.

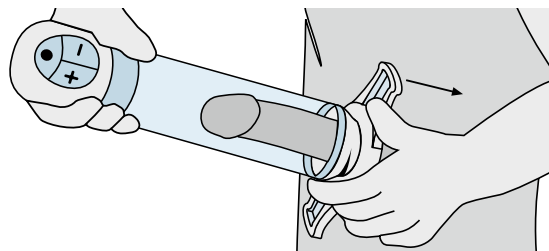


Dazu wird der Zylinder zunächst über den Penis geführt und anschließend mit dem Pumpvorgang begonnen. Durch das dabei entstandene Vakuum wird zusätzlich Blut in den Schwellkörper geleitet. Das führt zu einer Versteifung des Gliedes. Nun wird ein Stauring über den Penis gestreift. Er verhindert beim Abnehmen des Zylinders den Abfluss des Blutes und hält dadurch die Erektion aufrecht. Mit der so gehaltenen

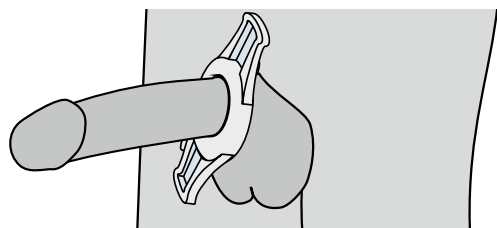

Erektion ist ein normaler und befriedigender Sex möglich. Der Stauring sollte nicht länger als 30 Minuten ohne Unterbrechung getragen werden.

ACTIVE Erection System^{NT}

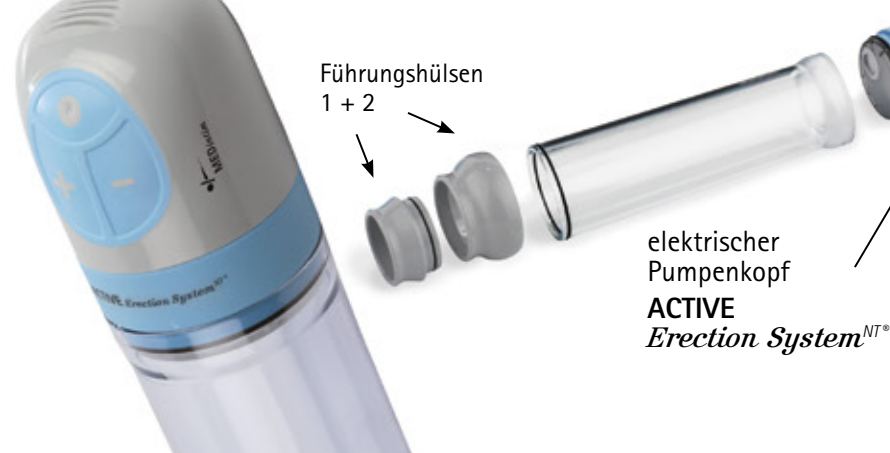

MANUAL Erection System[®]



Das ACTIVE Erection System^{NT} besteht aus:

- transparentem Zylinder (Innendurchmesser 53 mm, Länge 202 mm)
- elektrischer Vakuumpumpe mit drei AAA (Mignon) Batterien
- Führungshülse 1 und 2
- Konus (zum Aufschieben eines Stauringes)
- 4 verschiedenen Stauringen (Innendurchmesser 10 / 12,5 / 15 und 20 mm)
- Animé Gleitmittel 50 ml Flasche
- Gebrauchsanweisung
- DVD mit Gebrauchsanweisung und Anwendungsbildern
- Tasche zur Aufbewahrung

2 Jahre Gewährleistung auf den Pumpenkopf.

Unterschiede ACTIVE Erection System^{NT} und MANUAL Erection System[®]

Wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Systemen ist, dass das **MANUAL Erection System[®]** leiser (diskreter) und rascher einen stärkeren Druck erzeugt. Das **ACTIVE Erection System^{NT}** hingegen ist bequemer in der Anwendung.

Hinweis: Nach einer Prostata-Operation ist das **MANUAL Erection System[®]** die erfolgreichere Lösung.

Beide Geräte sind untereinander kompatibel, d. h. der Pumpenkopf passt jeweils auch immer auf den Zylinder des anderen Systems.

Beide Geräte sind qualitativ hochwertige, zertifizierte Medizinprodukte, hergestellt in Deutschland. Ersatzteile und Beratung sind auch nach dem Erwerb jederzeit möglich.

Made in Germany

Das MANUAL Erection System[®] besteht aus:

- transparentem Zylinder (Innendurchmesser 53 mm, Länge 202 mm)
- manueller Vakuumpumpe
- Führungshülse 1 und 2
- Konus (zum Aufschieben eines Stauringes)
- 4 verschiedenen Stauringen (Innendurchmesser 10 / 12,5 / 15 und 20 mm)
- Animé Gleitmittel 50 ml Flasche
- Gebrauchsanweisung
- DVD mit Gebrauchsanweisung und Anwendungsbildern
- Tasche zur Aufbewahrung

2 Jahre Gewährleistung auf den Pumpenkopf.

Vorteile

- Wiederherstellung der erektilen Funktion
- signifikante Verbesserung der Heilungserfolge (Durchblutung) z. B. nach Prostata OP
- keine bekannten Nebenwirkungen
- kann beliebig oft und langjährig angewendet werden
- kostengünstig
- keine Wechselwirkungen mit Medikamenten
- einfache und sichere Anwendung
- kann als erstattungsfähiges Hilfsmittel vom Arzt verordnet werden

Das **ACTIVE Erection System^{NT}** und das **MANUAL Erection System[®]** sind von den Krankenkassen anerkannte Hilfsmittel und können vom Arzt verordnet werden. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber.