



Material:

medizinisch zugelassenes
Thermoplastisches Elastomer (TPE)

PZN 19080823

EAN 4013273000857

Erhältlich in Apotheken und online.

Hersteller:

KESSEL medintim GmbH

Nordendstr. 82 – 84
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

Tel.: +49 6105 20 37 20

Fax: +49 6105 20 37 221

E-Mail: service@medintim.de

www.medintim.de

Backup Ring

verstärkt und verlängert
die Erektion

Was ist der Backup Ring?

Der Backup Ring ist ein Hilfsmittel und wird von Männern mit leichter Erektionschwäche benutzt. Er verbessert die Festigkeit und Fülle des Penis. Eine Größe passt allen.

Der Backup Ring hilft Männern, die nicht zufrieden sind mit der Qualität ihrer Erektion oder deren Erektion für sexuelle Aktivitäten nicht anhaltend fest genug ist. Wenn die Erektion verbessert wird, haben beide Partner ein intensiveres Gefühl.




Hinweis für Männer, die eine Vakuum-Erektionshilfe mit Stauring benutzen:


Benutzen Sie zunächst wie gewohnt die Vakuumerektionshilfe mit dem Stauring. Sobald der Stauring auf der Peniswurzel sitzt, nehmen Sie zusätzlich den Backup Ring und spannen ihn auf. Dann ziehen sie den Backup Ring über die Hoden und den Penis.

Anwendung:

Einfach auseinanderziehen (Abb. 1), über den Penis streifen (Abb. 2) und hinter den Hoden platzieren (Abb. 3).

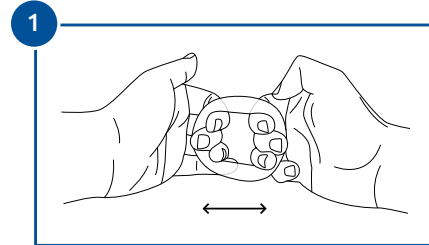

Der Backup Ring kann jederzeit über den Penis und die Hoden gestreift werden, unabhängig vom Erregungszustand des Penis.

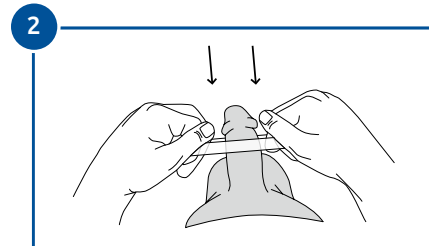

Der Backup Ring sitzt zwischen Hoden und Körper an der Peniswurzel. Er drückt dabei gegen den Penisboden. Dieser Ring führt und stabilisiert den Penis und die Hoden.

Oben, am Übergang vom Schaft zum Schambein kann der Ring für die Partnerin stimulierend wirken.

