



**Material Helpi® Ring:**  
medizinisch zugelassenes  
Thermoplastisches Elastomer (TPE)

**Material Hülse:**  
Polycarbonat (PC)

**PZN** 18658533  
**EAN** 4013273000574

Erhältlich in Apotheken und online.

**Hersteller:**

**KESSEL medintim GmbH**  
Nordendstr. 82 – 84  
64546 Mörfelden-Walldorf  
Germany

Tel.: +49 6105 20 37 20  
Fax: +49 6105 20 37 221  
E-Mail: [service@medintim.de](mailto:service@medintim.de)

[www.medintim.de](http://www.medintim.de)

# Helpi® Ring

Für Männer, die (zu) früh  
kommen.

# Was ist der Helpi® Ring?

Der Helpi® Ring sichert die Erektion und verhindert einen vorzeitigen, sichtbaren Samenerguss.\*

Eine einfache Lösung, ohne Medikamente, Cremes oder Gele.

Der Helpi® Ring ist eine sichere und einfache Methode, den Stress loszuwerden.

\*Hinweis:

Ein vorzeitiger Samenerguss (Ejaculatio Praecox) kann Symptom einer behandlungsbedürftigen Erkrankung (z. B. Prostatentzündung oder Schilddrüsenüberfunktion) sein. Wichtig ist es deshalb, frühzeitig einen Arzt aufzusuchen.

## Vorteile:

- hautfreundlich, weich, flexibel
- wiederverwendbar
- verträglich mit wasserlöslichen Gleitmitteln, Silikonöl, Hautcremes, pflanzlichen Fetten
- biokompatibel, gemäß ISO 10993 geprüft
- verträglich mit Kondomen aus Latex und Polyisopren
- frei von Latex, Phthalat, Bisphenol-A und Silikon

## Anwendung:

Den Ring auf die blaue Hülse spannen (Abb. 1). Hülse mit Ring über den Penis zum Körper schieben (Abb. 2). Den Ring von der Hülse auf den Penis streifen (Abb. 3). Hülse nun wegnehmen (Abb. 4). So hält und sichert der Helpi® Ring die Erektion, egal wann der Anwender kommt. Die Erektion bleibt auch nach dem Orgasmus des Mannes bestehen. Sex ist weiter möglich. Der Helpi® Ring stört nicht und kann für die Partnerin stimulierend wirken (Abb. 5). Der Anwender kann den Helpi® Ring jederzeit leicht entfernen. An den Eingriffen ziehen und einige Sekunden warten, bis der Penis abschwillt. Jetzt kann man den Ring einfach abstreifen (Abb. 6).

