

Häufige Ursachen von Erektionsstörungen und Impotenz sind:

- Diabetes
- Bluthochdruck/Herz-Kreislaferkrankungen
- Operationen der Prostata
- Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose)
- Herzinfarkt und Schlaganfall
- erhöhte Blutfettwerte
- Depressionen oder andere seelische Erkrankungen
- neurologische Erkrankungen (z. B. Multiple Sklerose, Querschnittslähmung)
- Gefäßerkrankungen der Schwellkörper des Penis
- Nieren- oder Leberinsuffizienz
- Medikamente (z. B. gegen Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Blutfettsenker, Entzündungshemmer, Antidepressiva, zur Entwässerung)
- Rauchen
- übermäßiger Alkoholkonsum

Lösung:

Bei diesen Erkrankungen ist die Vakuumtherapie eine effiziente, nebenwirkungsarme sowie einfach anzuwendende Alternative zur medikamentösen Therapie.

**Your
sexual
healthcare.**

Die Vakuumtherapie sollte nicht angewendet werden bei:

- Sichelzellenanämie
- Leukämie
- Knochenmarktumoren

Die Vakuumtherapie sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewandt werden bei:

- starken Blutgerinnungsstörungen

Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder rufen uns hierzu an.

Bestellinformationen

Active³
Erection System



Hilfsmittelnummer:
99.27.02.0017

erstattungsfähiges
Hilfsmittel

PZN 15657941
EAN 4013273001915
Art.-Nr. AES 3

CE 0483
Medizinprodukt

Manual
Erection System



Hilfsmittelnummer:
99.27.02.0022

erstattungsfähiges
Hilfsmittel

PZN 04605935
EAN 4013273001175
Art.-Nr. MES 01

CE
Medizinprodukt


KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82 – 84
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

Tel.: +49 6105 20 37 20
Fax: +49 6105 20 37 221
E-Mail: service@medintim.de

www.medintim.de

10.10.2023

Vakuumtherapie bei
Erektiler Dysfunktion
(Impotenz)

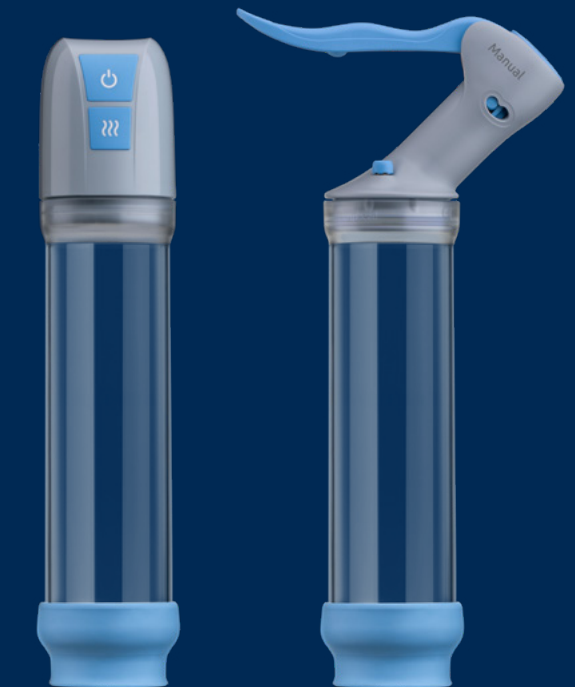


**Active³ & Manual
Erection System**


Medintim

Anwendung


Das Active³® Erection System und das Manual Erection System sind medizinische Hilfsmittel für die Vakuumtherapie bei erektiler Dysfunktion (Impotenz). Bei einer Vakuumtherapie wird die Erektion durch Unterdruck ermöglicht. Die Vakuumpumpe erzeugt einen Unterdruck im Zylinder um den Penis.

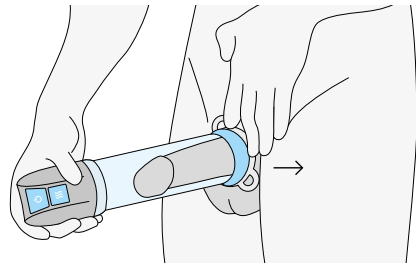

Dazu wird der Zylinder zunächst über den Penis geführt und anschließend mit dem Pumpvorgang begonnen. Durch das dabei entstandene Vakuum wird zusätzlich Blut in den Schwellkörper geleitet. Das führt zu einer Versteifung des Gliedes. Nun wird ein Stauring über den Penis gestreift.

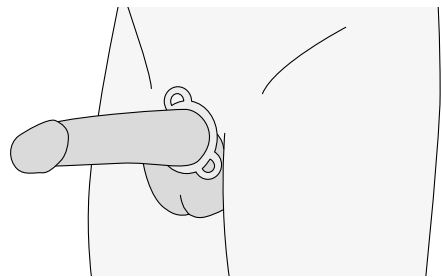

Er verhindert beim Abnehmen des Zylinders den Abfluss des Blutes und hält dadurch die Erektion aufrecht. Mit der so gehaltenen Erektion ist ein normaler und befriedigender Sex möglich. Der Stauring sollte nicht länger als 30 Minuten ohne Unterbrechung getragen werden.

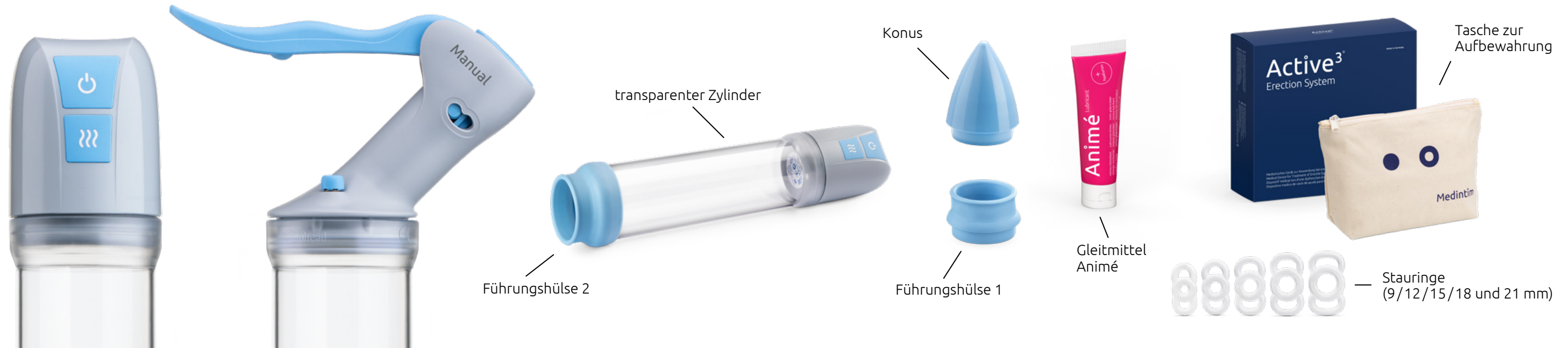

Active³ Erection System

Bestandteile:

- elektrischer, wiederaufladbarer Pumpenkopf
- transparenter Zylinder (Innendurchmesser 53 mm, Länge 200 mm)
- Führungshülse 1 und 2
- Konus (zum Aufschieben eines Stauringes)
- 5 verschiedene Stauringe (Innendurchmesser 9/12/15/18 und 21 mm)
- Ladekabel, USB-Stecknetzteil
- Animé Gleitmittel 50 ml
- Gebrauchsanweisung
- Tasche zur Aufbewahrung

2 Jahre Gewährleistung auf den Pumpenkopf

Manual Erection System

Bestandteile:

- manueller Pumpenkopf
- transparenter Zylinder (Innendurchmesser 53 mm, Länge 200 mm)
- Führungshülse 1 und 2
- Konus (zum Aufschieben eines Stauringes)
- 5 verschiedene Stauringe (Innendurchmesser 9/12/15/18 und 21 mm)
- Animé Gleitmittel 50 ml
- Gebrauchsanweisung
- Tasche zur Aufbewahrung

2 Jahre Gewährleistung auf den Pumpenkopf

Unterschiede Active³® und Manual

Beide Geräte sind in der Leistung vergleichbar gut und stark. Etwas bequemer ist das Active³® Erection System, weil kein Hebelarm zum Pumpen benutzt wird. Das Manual Erection System lässt sich etwas leichter reinigen, da der Pumpenkopf in Wasser gehalten werden kann. Beide Geräte sind leise und diskret zu nutzen.

Beide Geräte sind untereinander kompatibel, d. h. der Pumpenkopf passt jeweils auch immer auf den Zylinder des anderen Systems.

Beide Geräte sind qualitativ hochwertige, zertifizierte Medizinprodukte, hergestellt in Deutschland. Die Bestellung von Ersatzteilen und Beratung sind auch nach dem Erwerb jederzeit möglich.

Made in Germany

Vorteile

- Wiederherstellung der erektilen Funktion
- signifikante Verbesserung der Heilungserfolge (Durchblutung) z. B. nach Prostata-OP
- keine bekannten Nebenwirkungen
- kann beliebig oft und langjährig angewendet werden
- kostengünstig
- keine Wechselwirkungen mit Medikamenten
- einfache und sichere Anwendung
- kann als erstattungsfähiges Hilfsmittel vom Arzt verordnet werden

Das **Active³**® und das **Manual** Erection System sind von den Krankenkassen anerkannte Hilfsmittel und können vom Arzt verordnet werden. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber.