



Helfen,
entspannt
zu lieben.

Material Bumpi® Rings:

medizinisch zugelassenes
Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Material Aufbewahrungsdose:

Polypropylen (PP)

PZN 18604135

EAN 4013273000529

Erhältlich in Apotheken und online.

Hersteller:

KESSEL medintim GmbH

Nordendstr. 82 – 84

64546 Mörfelden-Walldorf

Germany

Tel.: +49 6105 20 37 20

Fax: +49 6105 20 37 221

E-Mail: service@medintim.de

www.medintim.de

Bumpi® Rings

Helfen ihr, damit er
nicht zu tief eindringt.

06.07.2023

Medintim



Frauen mit Endometriose, Gebärmuttervorfall, nach Hysterektomie oder mit Myomen haben manchmal Blutungen oder Schmerzen beim Sex. Medizinisch wird dieses Problem Kollisions-Dyspareunie genannt.

Trotz vielfältiger Ursachen gibt es eine einfache Lösung: Die weichen Bumpi® Ringe werden über den Penis gestreift und hindern den Partner so daran, zu tief einzudringen. Die Folge: schmerzfreier Sex, keine Angst mehr vor Verletzungen und endlich entspannte, erfüllte Sexualität.

Vorteile:

- hautfreundlich, weich, flexibel
- verträglich mit wasserlöslichen Gleitmitteln, Silikonöl, Hautcremes, pflanzlichen Fetten
- biokompatibel, gem. ISO 10993 geprüft
- verträglich mit Kondomen aus Latex und Polyisopren
- frei von Latex, Phthalat, Bisphenol-A und Silikon
- ökologisch designt
- langlebig und wiederverwendbar

Anwendung:

Ein oder mehrere weiche Bumpi® Ringe werden mit zwei Händen gedehnt und vor der Penetration bis zum Penischaft direkt vor die Hoden gezogen.

Je nach Anzahl der benutzten Bumpi® Ringe kann die Tiefe der Penetration individuell angepasst werden.

Zum Abziehen werden die Ringe ebenfalls wieder gedehnt und können so entfernt werden.

Die Anwendung des Bumpi® Rings ist einfach, schnell und stört nicht während des Liebespiels. Die Bumpi® Ringe können nicht hineinrutschen.

Die Bumpi® Ringe führen zu schmerzfreier und entspannter Sexualität für beide.

