

Hinweis:

Wir empfehlen dir, vor der ersten Benutzung unterwegs den Waypi® zu Hause unter der Dusche auszuprobieren, da die Benutzung eines Urintrichters anfangs ungewohnt sein kann. Der Waypi® Urintrichter ist in Apotheken, im Fachhandel oder direkt über medintim erhältlich.



Material: 100 % TPE, geruchsneutral 

PZN 15866627

EAN 4013273002127

Made in Germany

Hersteller:

KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82 – 84
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

Tel.: +49 6105 20 37 20

Fax: +49 6105 20 37 221

E-Mail: service@medintim.de

www.medintim.de



Neu!

Waypi®

Urintrichter für unterwegs
und andere Situationen

Ob in der Natur, beim Wandern, bei Festivals oder an der Raststätte: nicht vorhandene oder schmutzige Toiletten sind mit dem Waypi® kein Problem mehr. Im Stehen urinieren – hygienisch, einfach und mit praktischer Aufbewahrungsbox.

Der Waypi® bietet dir folgende Features:

- extra glatte, satinierte Oberfläche
- einfach zu reinigen
- passt sich gut an die Körperform an
- innovative Form verhindert überlaufen und spritzen
- mit Schlaufe zum praktischen Zusammenfallen
- mit passender Aufbewahrungsbox
- auf Wunsch auch mit Ablaufschlauch erhältlich
- passt auf alle Flaschen

So benutzt du den Waypi® richtig:

wiederverwendbar,
ökologisch,
kein unnötiger Müll

Nimm den noch gefalteten Waypi® aus seiner Aufbewahrungsbox. Zum Entfalten hebst du einfach die Schlaufe an, der Waypi® entfaltet sich von selbst.

Für die Anwendung wird der Waypi® Urintrichter an den Körper gehalten, mit der Schlaufe in Richtung Körper. Das Trichterende zeigt schräg nach vorne Richtung Boden. Achte darauf, dass der Waypi® den Ausgang der Harnröhre bedeckt.

Nach der Benutzung kannst du den Waypi® mit Wasser und Seife reinigen, wieder zusammenfallen und ihn in der Aufbewahrungsbox verstauen. Diese hat einen kleinen Belüftungsschlitzen an der Unterseite, damit sich keine Feuchtigkeit in der Box sammeln kann.

