

Hinweis:

Wir empfehlen, vor der ersten Benutzung den Waypi® Man in Ruhe auszuprobieren, da die Benutzung eines Urintrichters anfangs ungewohnt sein kann. Erhältlich in Apotheken, im Fachhandel oder direkt über medintim.



Material: 100 % TPE 

PZN 16783346

EAN 4013273002363

Made in Germany

Hersteller:

KESSEL medintim GmbH

Nordendstr. 82 – 84

64546 Mörfelden-Walldorf

Germany

Tel.: +49 6105 20 37 20

Fax: +49 6105 20 37 221

E-Mail: service@medintim.de

www.medintim.de



Neu!

Waypi[®] Man

Urintrichter für den Mann

Manche Männer haben es nicht einfach, Urin zu lassen: Bei körperlichen Einschränkungen, nach einer Operation oder bei Übergewicht können Männer mit dem Waypi® Urintrichter bequem und sauber im Stehen oder Sitzen urinieren – hygienisch, einfach, diskret und praktisch.

Die Vorteile des Waypi® Man:

- extra glatte, satinierte Oberfläche
- einfach zu reinigen
- passt sich gut an die Körperform an
- innovative Form verhindert überlaufen und spritzen
- mit Schlaufe zum praktischen Zusammenfallen
- mit praktischer, diskreter Aufbewahrungsbox
- auf Wunsch auch mit Ablaufschlauch erhältlich
- passt auf alle Flaschen, falls Urin aufgefangen werden soll

So benutzt man den Waypi® Man richtig:

wiederverwendbar,
ökologisch,
kein unnötiger
Müll

Der noch gefaltete Waypi® Man wird aus seiner Aufbewahrungsbox genommen. Zum Entfalten wird die Schlaufe angehoben, der Waypi® Man entfaltet sich von selbst.

Für die Anwendung wird der Waypi® Man über den Penis an den Körper gehalten, mit der Schlaufe in Richtung Körper. Das Trichterende zeigt schräg nach vorne Richtung Boden. Der Waypi® Man sollte den Ausgang der Harnröhre bedecken.

Nach der Benutzung kann der Waypi® Man mit Wasser und Seife gereinigt, wieder zusammengefallen und in der Aufbewahrungsbox verstaut werden. Diese hat einen kleinen Belüftungsschlitz an der Unterseite, damit sich keine Feuchtigkeit in der Box sammeln kann.

