

## Caya® passt auch zu Ihnen.

Das Caya® Diaphragma ist ein Verhütungsmittel für alle Frauen, die natürlich und sicher verhüten wollen.

Es ist **besonders** geeignet für Frauen:

- die hormonfrei verhüten wollen oder müssen (z. B. bei erhöhtem Thromboserisiko)
- die keine Spirale benutzen wollen oder dürfen
- in der Stillzeit
- die nur dann verhüten wollen, wenn sie Sex haben
- nach einer Entbindung / zwischen zwei Schwangerschaften
- die eine Latexallergie haben
- in Kombination mit natürlichen Methoden der Familienplanung (z. B. symptothermale Methode Spermien)

### Kontraindikationen:

- innerhalb der ersten 6 Wochen nach einer Entbindung
- bei starker Absenkung des Beckenbodens / Gebärmuttersenkung
- wenn beim herkömmlichen Diaphragma 60 mm und kleiner oder 85 mm und größer benutzt wurde

### Hinweis:

Caya® schützt nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Das Caya® Diaphragma ist frei verkäuflich in Apotheken erhältlich.

Es wird empfohlen Caya® immer in Kombination mit dem kontrazeptiven Caya® Gel anzuwenden.

## Vorteile vom Caya® Diaphragma

- hormonfrei
- einfache Handhabung – vergleichbar mit einem Tampon
- keine Nebenwirkungen
- wiederverwendbar: 2 Jahre lang
- latexfrei
- kein Anpassen erforderlich
- ökologisch und ökonomisch
- keine Beeinträchtigung sexueller Empfindungen beider Partner
- immer nur dann anzuwenden, wenn es notwendig ist
- zusammen mit dem Verhütungsgel bietet es **dreifache Sicherheit:**

1. Silikonmembran als mechanische Barriere
2. Zellulose im Verhütungsgel als zusätzliche mechanische Barriere
3. saurer pH-Wert (3,8) und Viskosität des Verhütungsgels hemmen die Motilität der Spermien

Das Caya® Diaphragma erhalten Sie zusammen mit:

- Gebrauchsanleitung
- Aufbewahrungsdose



# Caya®

Contoured diaphragm



PZN: 14017375  
Preis: 39,95 €

# Caya®

Diaphragm gel

PZN: 02950119  
Preis: 9,95 €



Erhältlich in Apotheken, im Fachhandel oder direkt unter [www.medintim-shop.de](http://www.medintim-shop.de)

**Hersteller:**  
KESSEL medintim GmbH  
Nordendstr. 82 – 84  
64546 Mörfelden-Walldorf  
Germany

Tel.: +49 6105 20 37 20  
E-Mail: [service@medintim.de](mailto:service@medintim.de)

[www.medintim.de](http://www.medintim.de)

CE 0483  
Medizinprodukt  
Made in Germany

hormonfrei  
sicher  
leicht anzuwenden



# Caya®

Contoured diaphragm

11.05.2021


Medintim

## Verhüten mit dem Caya® Diaphragma



Das Caya® Diaphragma ist ein neues **Barriere-Verhütungsmittel**.

Es ist **anatomisch** und **ergonomisch** geformt und passt daher den meisten Frauen.

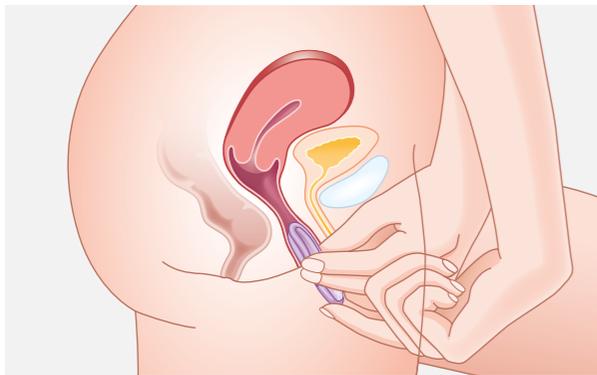

### Griffmulde

- zum Herausnehmen aus der Scheide

### Rand

- flexibel, gewährleistet die richtige Positionierung

### Griffknoppen

- erleichtern das Einführen in die Scheide
- An diesen Stellen wird das Diaphragma mit leichtem Fingerdruck gefaltet

### Silikonmembran

- bedeckt den Muttermund vollständig, so dass keine Spermien in die Gebärmutter gelangen
- Beim Sex nicht zu spüren




## Viele Frauen wünschen sich eine natürliche und sichere Verhütung – ohne Hormone!

Mit dem neuen Caya® Diaphragma verhüten Sie sicher und selbstbestimmt, dann wenn Sie es brauchen. Caya® wird vor dem Sex wie ein Tampon in die Scheide eingeführt. Es bedeckt den Muttermund vollständig und liegt zwischen dem hinteren Scheidengewölbe und der Nische am Schambein. Beim und nach dem Sex verhindert Caya® das Eindringen von Spermien in die Gebärmutter. Nach dem Verkehr muss das Caya® Diaphragma mindestens 6 Stunden in der Scheide verbleiben.

Weitere Informationen und Video zur Anwendung unter: [www.caya.eu](http://www.caya.eu)



[www.facebook.com/cayadiaphragma](https://www.facebook.com/cayadiaphragma)

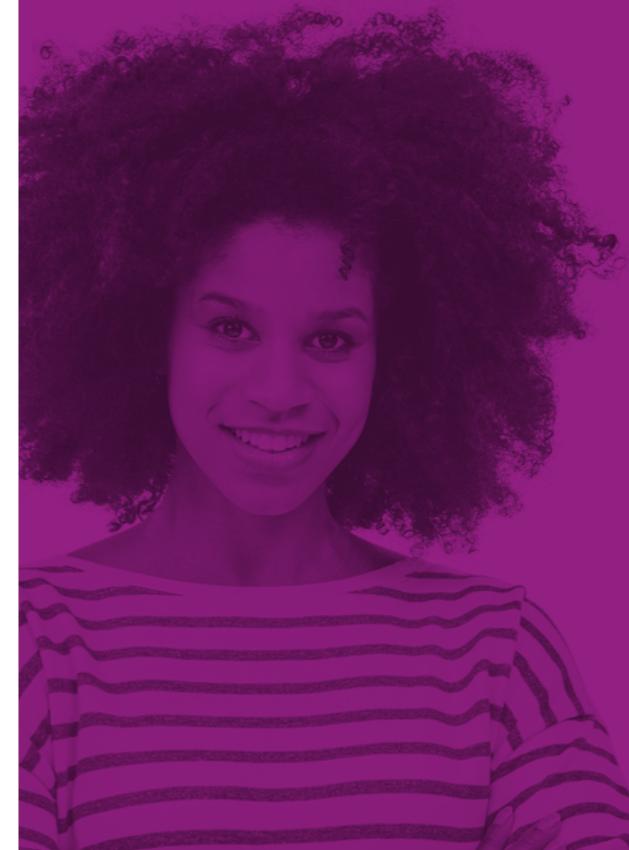

## Dreifache Sicherheit mit Caya®

Caya® Diaphragma und Caya® Gel garantieren Sicherheit:

1. Die Silikonmembran ist die mechanische Barriere direkt vor dem Muttermund. Der feste Rand des Caya® Diaphragmas schließt den Muttermund sicher ab.
2. Das Caya® Verhütungsgel enthält u. a. auch Zellulose, die eine weitere mechanische Barriere direkt am Muttermund darstellt.
3. Durch die enthaltene Milchsäure hat das Caya® Gel einen sauren pH-Wert, der die Spermien deaktiviert.

Gleichzeitig wirkt sich dieser pH-Wert positiv auf die Vaginalflora aus und schützt vor vaginalen Infektionen.

Sicherheit, die einfache Anwendung und der Tragekomfort von Caya® wurden in klinischen Studien bewiesen.<sup>1-4</sup>

# Caya®



### Referenzen

- 1 Yang CC, Maravilla K, Kilbourne-Brook M, Austin G, et al. Magnetic resonance imaging of SILCS diaphragm: anatomical consideration and corroboration with clinical fit. *Contraception* 2007; 76:238-244
- 2 Schwartz J, Ballagh S, Creinin M, et al. SILCS diaphragm: postcoital testing of a new single-size contraceptive device. *Contraception* 2008; 78:237-244
- 3 Co ey P, Kilbourne-Brook M, Brache V, Cochón L, et al. Comparative acceptability of the SILCS and Ortho ALL-FLEX® diaphragms among couples in the Dominican Republic. *Contraception* 2008; 78:418-423
- 4 Schwartz, Jill et al 2015 Contraceptive Efficacy, Safety, Fit, and Acceptability of a single-size diaphragm Developed with end-user input.