


Prefert® Vaginal Gel bei Kinderwunsch

Prefert® Vaginal Gel ist ein Gleitmittel zur Förderung der Beweglichkeit der Spermien. Es ist ohne Rezept in jeder Apotheke, im Fachhandel oder online erhältlich.

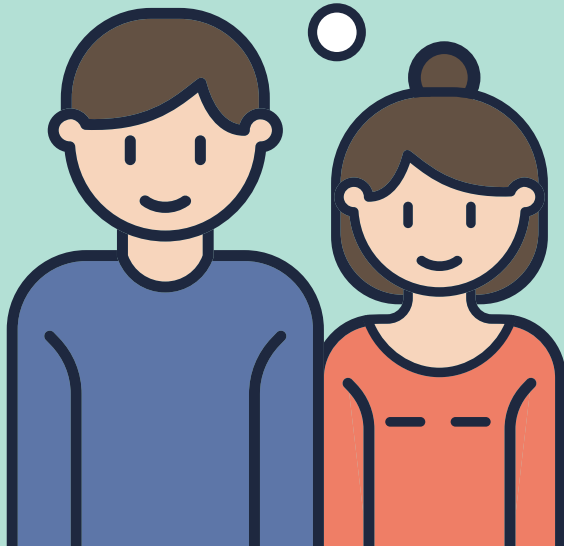

Inhaltsstoffe:

Gereinigtes Wasser, Natriumchlorid, Natriumphosphat, Kaliumphosphat, Arabinogalactan, Hydroxyethylcellulose, Polyhexanid

Frei von Parabenen, Silikonem und tierischen Bestandteilen. Vegan.

Inhalt:

- 8 Einmal-Applikatoren à 4 ml

Ausreichend für 4 – 8 Ovulationszyklen

Nach Gebrauch:

Applikator im Hausmüll entsorgen.

Pharmacode: 7768958

REF GEL PREFERT8



Medizinprodukt
Made in Germany

Beratung und Information in der Schweiz:

Inopharm

Brunnadernstrasse 21
3006 Bern

www.inopharm.ch

Hersteller:

KESSEL medintim GmbH

Nordendstr. 82 – 84
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

Tel.: +49 6105 20 37 20

E-Mail: service@medintim.de

www.medintim.de



Prefert®

Vaginal Gel bei
Kinderwunsch

Medintim

Prefert®

Vaginal Gel


Unterstützt die Beweglichkeit der Spermien

Bei jedem 7. Paar, das sich ein Kind wünscht, klappt es nicht auf Anhieb mit der heiß ersehnten Schwangerschaft. Das kann verschiedene Ursachen haben: Stress, zu hoher Erwartungsdruck oder körperliche Ursachen, wie zum Beispiel ein zu saures Scheidenmilieu oder eine zu geringe Anzahl von befruchtungsfähigen Spermien.

Einzigartig an Prefert® Vaginal Gel ist, dass es eine für die Spermien ideale Umgebung schafft: Die Lebensfähigkeit und Beweglichkeit der Spermien in der Scheide wird verbessert. So steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Ei befruchtet wird.

Viele Paare setzen sich selbst unter Druck und haben Sex nach der Uhr. Immer exakt zum Eisprung miteinander zu schlafen, kann auch stressig sein. Dies kann auch zu einer trockenen Scheide führen, was Schmerzen beim Sex verursachen kann.

Mit Prefert® Vaginal Gel geht es leichter und lustvoller. Die herkömmlichen, wasserlöslichen Gleitmittel beeinflussen durch ihren niedrigen pH-Wert (=saurer pH-Wert) die Spermien negativ. Diese Gleitmittel verringern die Fruchtbarkeit und ändern die Viskosität des Scheidensekrets.

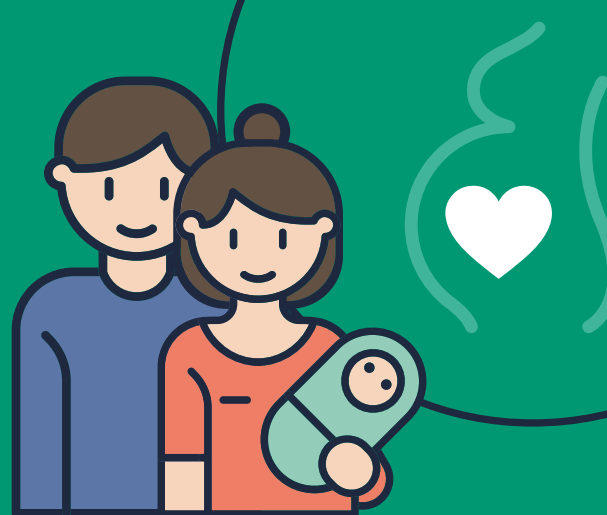

hilft,
schwanger zu
werden



Schafft eine optimale Umgebung für die Befruchtung

Prefert® Vaginal Gel schafft für die Befruchtung den idealen pH-Wert zwischen 7,0 bis 7,4 in der Scheide. Es fördert die Befruchtung der Eizelle.

Anwendung:

Prefert® Vaginal Gel wird vor dem Sex mit dem Applikator direkt in die Scheide eingeführt. Das Gleitmittel sorgt für die ideale Feuchtigkeit und Umgebung für die Spermien. Die Gleitfähigkeit wird verbessert und der Sex kann auch bei Stress genussvoll empfunden werden.

Tipp: Sie können selbst klären, ob Ihr vaginaler pH-Wert zum Zeitpunkt der Ovulation zu sauer ist. Besorgen Sie sich ein pH-Teststäbchen (Apotheke) und messen damit den pH-Wert zum Zeitpunkt Ihres Eisprungs. Liegt der Wert bei 5,0 oder darunter, ist das Milieu zu sauer, um schwanger zu werden.

Prefert® Vaginal Gel ist durch den angepassten pH-Wert zwischen 7,0 bis 7,4 optimal für die Spermien. Dies ist der natürliche pH-Wert der Scheide während der fruchtbaren Tage. An den übrigen Tagen des weiblichen Zyklus ist der pH-Wert niedriger. Die osmotischen Eigenschaften von Prefert® Vaginal Gel helfen den Spermien, leichter zum Muttermund zu gelangen.

Weitere Eigenschaften

- frei von Silikonen und Parabenen
- geruch- und farblos
- geschmacksneutral
- verursacht keine Flecken
- wasserlöslich
- vegan

Wirkstoff:

Bioaktives Arabinogalactan wirkt antioxidativ und fördert die Beweglichkeit der Spermien.

Bitte beachten:

Bei einer Infektion oder Verletzung der Scheide sollte das Produkt nicht verwendet werden. Nach operativen Eingriffen bitte vor der Verwendung von Prefert® Vaginal Gel Ihre/n Arzt/Ärztin befragen.