

Vagiwell®

Dilator 5 LS

Vaginaler Dehnungsstift (Dilatator)
zur persönlichen Anwendung

Indikationen

- bei Neovagina (geschlechtsangleichender Operation), Bougieren (Offenhalten)
- bei Lichen Sclerosus (um den Vaginaleingang funktionsfähig zu halten)

Anwendung

Der Vagiwell® Dilator 5 LS wird vor der ersten Anwendung mit heißem Wasser und milder Seife gereinigt und vollständig abgetrocknet.

Der Eingang der Vagina und der Dehnungsstift werden mit wasserlöslichem Gleitmittel benetzt und der Dilator in entspannter Position eingeführt.

Zum Entfernen wird der Dehnungsstift vorsichtig aus der Vagina gezogen.

Lichen-Sclerosus-Patientinnen nutzen den Dehnungsstift meist täglich einmal, um den sklerotischen (festen) Eingang der Vagina und die Vulva dehnbar zu halten.

Falls gewünscht, können zunächst progressiv gesteigert die Vagiwell® Dehnungsstifte der Größen 1 – 5 benutzt werden. Falls der Vagiwell® 5 LS nicht ausreichend ist, gibt es alternativ die Größe Vagiwell® No.6.

Reinigung

Der Vagiwell® Dehnungsstift 5 LS ist für den persönlichen Gebrauch nur durch eine Anwenderin gedacht. Nach dem Gebrauch wird der Dehnungsstift mit warmem Wasser und milder Seife gereinigt.

Lieferumfang

- ein Vagiwell® Dilator 5 LS
- wasserlösliches Gleitmittel, 50 ml
- Tasche zur Aufbewahrung
- Gebrauchsanweisung

Material

- Vagiwell® Dilator: Silikon
- Tasche: Baumwolle/Nylon®

Vagiwell® Dilators 5 LS

Art. Nr.: Vagiwell 5 LS

EAN: 4013273002165

PZN: 15994727

Größe	Farbe	Breite A / B	Länge C
Gr. 5 LS	Weiß	33/36 mm	181 mm

