

Vagiwell®

Dilator No. 6

Vaginaler Dehnungsstift (Dilatator)
zur persönlichen Anwendung

Indikationen

- bei Neovagina (geschlechtsangleichender Operation), Bougieren (Offenhalten)
- bei Lichen Sclerosus (falls Vagiwell® Dehnungsstift 5 LS nicht ausreichend ist)

Anwendung

Während der Einlage kann der Dilatator ggf. an einem Suspensorium befestigt werden.

Hierzu hat der Vagiwell® No. 6 drei spezielle Ösen. Enge Unterwäsche kann den Dehnungsstift ebenfalls gut positionieren.

Bei Schmerzen sollte der Dehnungsstift sofort entfernt und mit dem behandelnden Arzt bzw. der Ärztin geklärt werden, wie weiter vorgegangen werden soll.

Falls gewünscht, können zunächst progressiv gesteigert die Vagiwell® Dehnungsstifte der Größen 1 – 5 und 5 LS benutzt werden, bevor Vagiwell® No. 6 erstmals eingeführt wird.

Reinigung

Der Vagiwell® Dehnungsstift No. 6 ist nur für den persönlichen Gebrauch durch eine Anwenderin gedacht. Nach dem Gebrauch wird der Dehnungsstift mit warmem Wasser und milder Seife gereinigt.

Lieferumfang

- ein Vagiwell® Dilator No. 6
- wasserlösliches Gleitmittel, 50 ml
- Tasche zur Aufbewahrung
- Gebrauchsanweisung

Material

- Vagiwell® Dilator: Silikon
- Tasche: Baumwolle/Nylon®

Vagiwell® Dilators No. 6

Art. Nr.: Vagiwell No. 6

EAN: 4013273001632

PZN: 11008157

Größe	Farbe	Breite A / B	Länge C
No. 6	Weiß	39/41 mm	188 mm

