



Anéis de erecção

Reforça e prolonga a erecção.

Utilização:

Passar primeiro os testículos e de seguida o pénis não erecto através do anel. O anel de constrição deve ficar situado entre os testículos e o corpo na raiz do pénis (haste). No caso de um tamanho correctamente seleccionado, o anel fica apertado, sem no entanto doer! Com a excitação, o pénis enche-se de sangue, de modo que o anel provoca uma acumulação. Esta reforça a erecção e provoca em ambos os parceiros uma sensação mais intensiva. A parceira pode ser estimulada adicionalmente pelo anel no clítoris. Mesmo após o orgasmo, o pénis pode manter a sua rigidez e o seu tamanho, pelo que o acto amoroso pode ser prolongado.

Nota:

Tenha em atenção que a acumulação de sangue prolongada pode provocar dores. Se tiver alergia ao látex, não utilize os anéis.

- Conteúdo: 3 anéis de erecção
- Látex de borracha natural
- Cor: azul
- Diâmetro interno: 3 tamanhos: 32 | 38 | 50 mm

Ref.: MI ER
EAN 40 13273 000734

