



Anillos para erección

Refuerzan y prolongan la erección.

Aplicación:

Haga pasar a través del anillo primero los testículos y después el pene no erecto. El anillo para erección queda entre los testículos y el cuerpo, en la raíz del pene. Si ha seleccionado el tamaño adecuado, el anillo debe estar firmemente sujeto pero sin hacer daño. Con la excitación sexual, el pene se llena de sangre: el anillo impide el reflujo de la misma, con lo que refuerza la erección y permite que ambos miembros de la pareja disfruten de sensaciones más intensas. Además, el anillo puede proporcionar un estímulo adicional al clitoris de la pareja. Incluso después del orgasmo, el pene mantiene su rigidez y tamaño, lo que permite prolongar la relación amorosa.

Observación:

Tenga en cuenta que la retención excesivamente prolongada de la sangre puede provocar dolor. No debe utilizar los anillos si es usted alérgico al látex.

- Contenido: 3 anillos para erección
- Látex natural
- Color: azul
- 3 tamaños diferentes, diámetro interno 32, 38 y 50 mm

Referencia: MI ER
EAN 40 13273 000734

