



\*no contiene nonoxinol-9

# Contragel<sup>®</sup> verde

Gel anticonceptivo para la anticoncepción con diafragmas o capuchones cervicales

**Contragel<sup>®</sup> verde** es un gel anticonceptivo para uso con anticonceptivos de diafragma o capuchón cervical. La seguridad de estos métodos anticonceptivos aumenta gracias al uso de **Contragel<sup>®</sup> verde**.

## Modo de acción

**Contragel<sup>®</sup> verde** forma, mediante la celulosa (formador del gel), una barrera mecánica adicional antes del orificio uterino. El ácido láctico de su formulación reduce el valor del pH vaginal. El mayor grado de acidez y la viscosidad del gel poseen un efecto inhibitor de la motilidad de los espermatozoides. Esta formulación con base de ácido láctico ya fue examinada en 1989 en un estudio comparativo de diferentes geles y cremas para diafragma (Dittrich 1989), siendo igual de segura que los productos que contenían nonoxinol-9, pero con un potencial de reacciones adversas notablemente más bajo.

## Forma de uso

Antes de insertar el diafragma o el capuchón cervical aplique más o menos una cucharadita llena (unos 4 ml) de **Contragel<sup>®</sup> verde** en el diafragma o el capuchón cervical.

Observe atentamente también las instrucciones de uso de su diafragma o capuchón cervical

## Observaciones:


- **Contragel<sup>®</sup> verde** no ofrece protección frente a enfermedades de transmisión sexual
- **Contragel<sup>®</sup> verde** usado sin diafragma o capuchón cervical no brinda protección anticonceptiva
- el gel es soluble en agua y compatible con preservativos de látex natural o poliuretano

## Composición:

Agua, ácido láctico, lactato sódico, celulosa y ácido sórbico

## Contenido:

60 g de gel

Conservación: 4°C  25°C


Conservar en lugar fresco y seco. Mantener el tubo siempre cerrado. Después de la apertura utilizar en un plazo de 3 meses.

De venta en establecimientos especializados y farmacias.

PZN 04116596

EAN 40 13273 000208

 DeltaMed GmbH  
Raiffeisenstr. 8a  
61169 Friedberg  
Germany

 0124  
Producto sanitario  
Made in Germany

Derechos de comercialización globales:



KESSEL medintim GmbH  
Kelsterbacher Straße 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. +49 (0) 6105 20 37 20  
Fax +49 (0) 6105 45 59 01  
Email: service@medintim.de



[www.medintim.de](http://www.medintim.de)