



*bevat geen nonoxynol-9

Contragel[®] groen

Anticonceptie-gel voor bescherming met pessaria of cervixkapjes

Contragel[®] groen is een anticonceptie-gel voor gebruik in combinatie met pessaria of cervixkapjes als voorbehoedsmiddelen. Door het gebruik van **Contragel[®] groen** neemt de veiligheid van deze voorbehoedsmiddelen toe.

Werking

Contragel[®] groen vormt met behulp van de cellulose (gelvormer) een extra mechanische barrière vóór de baarmoedermond. Het melkzuur in de gel verlaagt de pH-waarde in de vagina. De verhoogde zuurgraad en de viscositeit van de gel hebben een motiliteitsremmend effect op de spermacellen. Deze samenstelling op melkzuurbasis werd reeds in 1989 (Dittrich 1989) in een vergelijkend onderzoek met verschillende pessariumgels en -crèmes net zo veilig geacht als producten met nonoxynol-9, echter met een duidelijk lager risico op bijwerkingen.

Utilisation

Doe vóór het inbrengen van het pessarium of het cervixkapje ongeveer één volle theelepel (ca. 4 ml) **Contragel[®] groen** in het pessarium of cervixkapje. Neem hiervoor tevens de gebruiksaanwijzing van uw pessarium of cervixkapje in acht.

Aanwijzing:

- **Contragel[®] groen** biedt geen bescherming tegen seksueel overdraagbare aandoeningen
- **Contragel[®] groen** zonder gebruik van pessarium of cervixkapje heeft geen contraceptieve werking
- in water oplosbaar en kan gebruikt worden bij condoms van natuurlijk rubberlatex of polyurethaan

Bestanddelen:

Water, melkzuur, natriumlactaat, cellulose, sorbinezuur

Inhoud:

60 g gel

Bewaren: 4°C  25°C

Koel en droog bewaren. Tube altijd goed afgesloten. Na het openen binnen 3 maanden opgebruiken.

Verkoop via speciaalzaken en apotheken.


PZN 04116596

EAN 40 13273 000208

Distributeur Nederlands:

Memidis Pharma b.v.
Postbus 211, 6600 AE Wijchen
Tel. +31 (0) 24 64 55 4 11
www.memidis.nl

 DeltaMed GmbH
Raiffeisenstr. 8a
61169 Friedberg
Germany

 0124
Medisch hulpmiddel
Made in Germany

Wereldwijd verkooprecht:



KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. +49 (0) 6105 20 37 20
Fax +49 (0) 6105 45 59 01
Email: service@medintim.de



www.medintim.de