



Zubehör: Tasche



Zubehör:
Verlängerungsrohre

Lady P

Trichter zum Urinieren für Frauen – auch im Stehen

Für Sportlerinnen, unterwegs bei Festivals oder beim Wandern, während einer Schwangerschaft oder bei eingeschränkter Beweglichkeit hilft Lady P beim sicheren und hygienischen Urinieren. Fremde und schmutzige Toiletten sind somit kein Problem mehr.

Anwendung:

Nehmen Sie das Lady P mit den Fingern an der Hinter- und Vorderseite, legen Sie es am Körper an, so dass es sich mit dem gesamten Rand anschmiegt, vor allem hinten und seitlich. Drücken Sie aber nicht mit großem Druck auf eine Stelle, damit nicht anderswo eine Undichtheit entsteht. Probieren Sie die Anwendung zum Beispiel vorab zu Hause in der Dusche aus.

Eigenschaften:

- wiederverwendbar und umweltfreundlich
- bestehend aus medizinischem Silikon
- frei von Phthalaten und BPA
- einfache Pflege
- elastisch und zusammenlegbar
- lieferbares Zubehör

Inhalt:

1 x Lady P Urinierhilfe
Größe: H 95 mm, B 60 mm, L 154 mm
Material: medizinisch zugelassenes Silikon
Farben: lieferbar in pink oder purple
PZN 8810052 / EAN 8594156936006

Lieferbares Zubehör:

Verlängerungs- rohre:

Material: medizinisch
zugelassenes Silikon
Länge: 200 mm
Ø (innen): 10 mm
Farbe: transparent
PZN 9423340
EAN 8594156936013

Tasche:

Material: Polyester
Farbe: purple
PZN 9423357
EAN 8594156936020

Pflege:

Mit Wasser abwaschen oder abspülen.
Lady P beschädigen Sie auch nicht durch
Auskochen oder Sterilisieren.
Zur Erinnerung: Der Harn beim Urinieren
ist steril.

