



**MEDintim**  
personal healthcare



mit  
Hyaluronat und  
Milchsäure



# Premeno<sup>®</sup> duo

## Vaginalzäpfchen bei Scheidentrockenheit

Das hormonfreie Zäpfchen **Premeno<sup>®</sup> duo** reguliert den Feuchtigkeitshaushalt der Vagina und stellt gleichzeitig den natürlichen pH-Wert zur Infektabwehr wieder her.

### Anwendungsbereiche:

Die Menopause, eine Krebsbehandlung oder auch Faktoren wie Stress oder eine veränderte Östrogenproduktion können zu einer zu trockenen Scheide führen. Brennen, Juckreiz oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr entstehen.

**Premeno<sup>®</sup> duo** reguliert mit Hyaluronat den Feuchtigkeitshaushalt der Scheide und verhindert weitere Infektionen, indem der natürliche (leicht saure) pH-Wert wieder hergestellt wird.

### Eigenschaften:

- hormonfrei
- erhöht die Feuchtigkeit
- fördert die Wundheilung
- geschmacks- und geruchsneutral
- frei von Konservierungsstoffen, Parabenen und pflanzlichen Zusatzstoffen
- geringes Nebenwirkungspotenzial

### Anwendung:

- zur **Behandlung und Prophylaxe:**  
1x täglich bis 1x alle 3 Tage
- bei **bakteriellen Infektionen:**  
Anfangsdosis: 10 Tage jeweils ein Zäpfchen vor dem Schlafengehen  
Erhaltungsdosis: jeweils ein Zäpfchen jeden 3.Tag solange erwünscht

### Inhaltsstoffe:

Ein Zäpfchen enthält 5 mg Hyaluronsäure-Na sowie eine Kombination aus Milchsäure und Natriumlactat.


Weitere Informationen unter [www.premeno.de](http://www.premeno.de)

In Apotheken, im Fachhandel oder direkt über **KESSEL MEDintim** erhältlich.

### Inhalt

10 Ovula (Zäpfchen)	3 x 10 Ovula (Zäpfchen)
REF: Med Pre	REF: Med Pre 3
PZN: 06078411	PZN: 05352962
EAN: 4013273500012	

 DeltaMed GmbH  
Raiffeisenstr. 8a  
61169 Friedberg  
Deutschland

 0124  
Medizinprodukt  
Made in Germany



KESSEL medintim GmbH  
Nordendstr. 82-84  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel.: 06105 20 37 20  
Fax: 06105 20 37 221  
E-Mail: [service@medintim.de](mailto:service@medintim.de)



[www.medintim.de](http://www.medintim.de)