

Prefert® Gleitmittel für Kinderwunschpaare

Prefert® ist ein klinisch getestetes natürliches Gleitmittel zur optimalen Förderung der Spermienbeweglichkeit. Es ist ohne Rezept in jeder Apotheke erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.prefert.com

Inhaltsstoffe:

Gereinigtes Wasser, Natriumchlorid, Natriumphosphat, Kaliumphosphat, Arabinogalactan, Hydroxyethylcellulose, Polyhexanid.

Frei von Parabenen, Silikonen und tierischen Bestandteilen.

Inhalt:

- 4 Einzelspritzen à 6 ml
- 1 Vaginalapplikator (wiederverwendbar)

Ausreichend für 2–4 Ovulationszyklen

Nach Gebrauch: Spritzen im Hausmüll entsorgen

Applikator: mit warmem Wasser abspülen – wiederverwendbar

Prefert® ist in Apotheken, im Fachhandel oder direkt über
KESSEL MEDintim unter www.medintim-shop.de erhältlich.

PZN 11483154

REF Gel Prefert



Medizinprodukt
Made in Germany



KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82 – 84
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. +49 (0) 6105 20 37 20
Fax +49 (0) 6105 20 37 221
E-Mail: service@medintim.de

www.prefert.com



frei von
Parabenen und
Silikonen

Prefert® Vaginal Gel

Gleitgel für Paare
bei Kinderwunsch


MEDintim
personal healthcare



Prefert® Vaginal Gel

Ein Gleitmittel zur Unterstützung der Beweglichkeit der Spermien

Bei jedem 7. Paar, das sich ein Kind wünscht, klappt es nicht auf Anhieb mit der heiß ersehnten Schwangerschaft. Das kann verschiedene Ursachen haben: Stress, zu hoher Erwartungsdruck oder körperliche Ursachen, wie zum Beispiel ein zu saures Scheidenmilieu oder eine zu geringe Anzahl von befruchtungsfähigen Spermien.

Viele Paare setzen sich selbst unter Druck und haben Sex nach der Uhr. Immer exakt zum Eisprung zusammen zu schlafen, kann auch stressig sein. Dies kann auch zu einer trockenen Scheide führen, was Schmerzen beim Sex verursachen kann.

Abhilfe schafft ein Gleitgel, mit dem alles leichter und lustvoller vor sich geht. Die herkömmlichen, wasserlöslichen Gleitmittel beeinflussen durch ihren niedrigen pH-Wert (=saurer pH-Wert) die Spermien negativ. Diese Gleitmittel verringern die Fruchtbarkeit und ändern die Viskosität des Scheidensekrets.

Einzigartig an **Prefert®** Vaginal Gel ist, dass es eine für die Spermien ideale Umgebung schafft: Die Lebensfähigkeit und Beweglichkeit der Spermien wird verbessert. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ei befruchtet wird.

Schaffen Sie eine optimale Umgebung für die Befruchtung

Erleben Sie Sexualität unter optimalen Bedingungen für eine Schwangerschaft. **Prefert®** wird vor dem Sex mit dem Applikator direkt in die Scheide eingeführt. Das Gleitmittel sorgt für die ideale Feuchtigkeit und Umgebung für die Spermien in der Vagina und am Muttermund. Die Gleitfähigkeit wird verbessert und der Sex kann auch unter Stressbedingungen genussvoll empfunden werden.

Prefert® Vaginal Gel schafft für die Befruchtung den idealen pH-Wert zwischen 7,0 bis 7,4 in der Scheide und fördert dadurch die erfolgreiche Befruchtung der Eizelle

Tipp: Sie können selbst klären, ob Ihr vaginaler pH-Wert zum Zeitpunkt der Ovulation zu sauer ist. Besorgen Sie sich ein pH-Teststäbchen und messen damit den pH-Wert zum Zeitpunkt Ihres Eisprunges.

Prefert®

Vaginal Gel für Paare mit Kinderwunsch

Prefert® ist optimal für die Spermien durch den angepassten pH-Wert zwischen 7,0 bis 7,4. Das entspricht dem natürlichen pH-Wert der Scheide während der fruchtbaren Tage. An den übrigen Tagen des weiblichen Zyklus ist der pH-Wert niedriger. Die osmotischen Eigenschaften von **Prefert®** helfen den Spermien, leichter zum Muttermund zu gelangen.

Weitere Eigenschaften

- geruch- und farblos
- geschmacksneutral
- klinisch getestet
- verursacht keine Flecken
- wasserlöslich



Wirkstoff:

Bioaktives Arabinogalactan, gewonnen aus Lärchenholz, wirkt antioxidativ und fördert die Vitalität der Spermien.

Prefert® fördert die Bedingungen der Fruchtbarkeit. Falls bei der Anwendung von **Prefert®** Reizungen oder Missempfindungen auftreten, bitte das Produkt nicht weiter verwenden. Wenn diese Probleme anhalten, suchen Sie bitte einen Arzt auf. Bei einer Infektion oder Verletzung der Scheide sollte das Produkt nicht verwendet werden. Nach operativen Eingriffen bitte vor der Verwendung von **Prefert®** Ihre/n Arzt/Ärztin befragen.