

Caya[®]

contoured diaphragm

THE SMART CONTRACEPTION


MEDintim
personal healthcare



PZN 14017375
Preis: 39,95€ UVP



Caya[®]

diaphragm gel

PZN 02950119
Preis: 9,95€ UVP




Rezeptfrei erhältlich in Apotheken, im Fachhandel oder direkt unter www.medintim-shop.de

Caya[®]

contoured diaphragm


Kessel medintim GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf (Frankfurt)
Germany
Tel: +49 (0) 6105 20 37 20
www.medintim.com

Made in Germany

 0483
Medizinprodukt

Weitere
Informationen
www.caya.eu




**Hormonfrei.
Sicher.
Leicht anzuwenden.**

Passt ohne Anpassen.

Caya[®] contoured diaphragm

Das neue Diaphragma: anatomisch geformt!

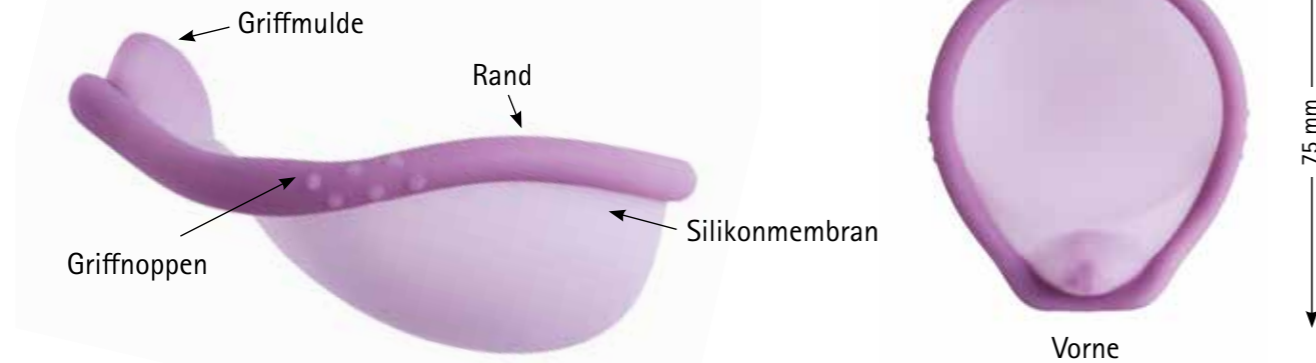

Das Caya[®] contoured diaphragm ist ein neu entwickeltes Barriere-Verhütungsmittel.

Es ist anatomisch und ergonomisch geformt und passt daher den meisten Frauen.¹

- **Silikonmembran:** hauchdünn, bedeckt die Zervix vollständig. Beim Sex nicht zu spüren.
- **Rand:** flexibel, verleiht dem Diaphragma Stabilität und unterstützt das Einführen des Diaphragmas in die Scheide. Der Rand sorgt für den Halt und gewährleistet die richtige Positionierung des Diaphragmas.
- **Griffknoppen:** Orientierungshilfe für das Einführen. An diesen Stellen wird das Diaphragma mit leichtem Fingerdruck gefaltet.
- **Griffmulde:** erleichtert das Entfernen des Diaphragmas aus der Scheide.

Kein Anpassen mehr!

Die ovale und an das Scheidengewölbe angepasste Form macht das bisherige Anpassen eines Diaphragmas überflüssig.

Indikation:

Das Caya[®] Diaphragma ist ein Verhütungsmittel für alle Frauen, die natürlich und sicher verhüten wollen.

Es ist besonders geeignet:

- wenn hormonfreie Verhütung erwünscht oder medizinisch erforderlich ist (z. B. erhöhtes Thromboserisiko)
- wenn IUD nicht erwünscht oder kontraindiziert
- in der Stillzeit
- bei Wunsch nach selbstbestimmter Verhütung
- Latexallergie
- zwischen zwei Schwangerschaften
- in Kombination mit natürlichen Methoden der Empfängnisverhütung (z. B. symptothermale Methode)

Sicherheit:

Dreifache Sicherheit:

- Silikonmembran: mechanische Barriere
- im Verhütungsgel enthaltene Zellulose: zusätzliche mechanische Barriere am Muttermund
- saurer pH-Wert und Viskosität des Gels: motilitätshemmender Effekt auf Spermatozoen

Studien haben gezeigt, dass Sicherheit und Compliance zunehmen, je länger und häufiger Frauen ein Diaphragma zur Verhütung verwenden.⁵

Kontraindikationen:


- 6 Wochen post partum
- falls bisher beim Diaphragma 60mm und kleiner oder 85 mm und größer verwendet wurde
- ausgeprägte Deszensus uteri et vaginae
- Zystozele mit Aufhebung der retropubischen Nische in der Vagina
- wenig ausgeprägte oder fehlende retropubische Nische

Wie funktioniert das Caya[®] Diaphragma?

- wird wie ein Tampon in die Scheide eingeführt
- liegt zwischen dem hinteren Scheidengewölbe und der Nische am Schambein
- bedeckt die Zervix vollständig
- wirkt als mechanische Barriere gegen die Migration von Spermien in den Uterus

Caya[®] ist immer in Kombination mit einem kontrazeptiven Gel (z. B. Caya[®] Gel) anzuwenden.

Video zur Anwendung unter: www.caya.eu

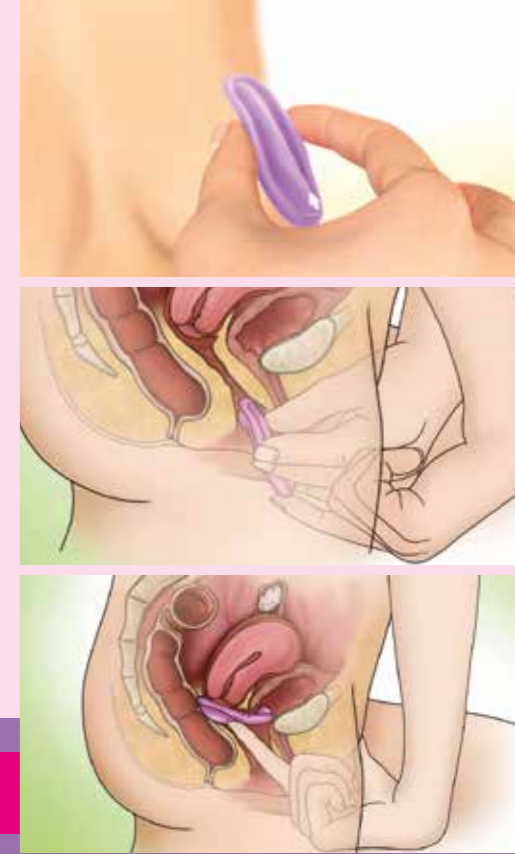

Vorteile des Caya[®] Diaphragmas

- hormonfrei
- eine Größe passend für die meisten Frauen
- sicher und verlässlich
- einfache Handhabung
- keine Nebenwirkungen
- selbstkontrollierte Verhütungsmethode
- beim Sex nicht zu spüren
- der weiblichen Anatomie entsprechend geformt
- latexfrei
- ökologisch, da wiederverwendbar
- ökonomisch: kann zwei Jahre verwendet werden
- keine Beeinträchtigung sexueller Empfindungen beider Partner

Caya[®] – Sicherheit, einfache Anwendung und Tragekomfort wurde in klinischen Studien bewiesen.


Studien haben gezeigt, dass Sicherheit und Compliance zunehmen, je länger und häufiger Frauen ein Diaphragma zur Verhütung verwenden.⁵

Form und Funktion von Caya[®] wurden in mehreren unabhängigen Studien¹⁻⁴ in den USA ermittelt und geprüft. In einer klinischen Multicenter-Studie⁴ von CONRAD (www.conrad.org) wurde an zehn Zentren in den USA mit 450 Paaren die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit, Sicherheit, Akzeptanz dieser Verhütungsmethode sowie die Passgenauigkeit untersucht:

ERGEBNIS:

Das Caya Diaphragma ist so sicher und effektiv wie ein herkömmliches Diaphragma. Die 6-Monats-Schwangerschaftswahrscheinlichkeit nach Kaplan-Meier beträgt 10,4 %. Dieser Wert ist nicht mit dem Pearl-Index gleichzusetzen, welcher eine langfristig ermittelte Methodensicherheit definiert (Siehe hierzu: http://de.wikipedia.org/wiki/Pearl_Index).

Der Pearl-Index der Methode "Diaphragma" ist vergleichbar mit dem von Kondomen für Männer aus Naturkautschuklatex.

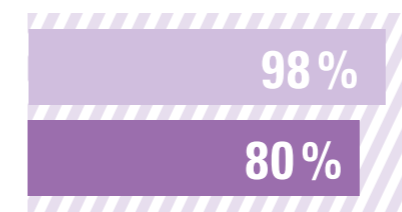

■ Das Caya[®] Diaphragma war für 98 % der Probandinnen (439 / 450) geeignet.

■ Fast 80% der Probandinnen konnten das Caya[®] beim ersten Versuch richtig positionieren, den Sitz korrekt überprüfen und entfernen nachdem sie nur die Gebrauchsanweisung gelesen hatten – ohne die Hilfe eines Arztes oder medizinischem Fachpersonals.

Nach zusätzlicher Hilfestellung durch einen Arzt war das Diaphragma bei 94% der Studienteilnehmerinnen in der richtigen Position.

Referenzen

- 1 Mauck C, Lai JJ, Schwartz J, Weiner D, et al. Diaphragms in clinical trials: is clinician fitting necessary? *Contraception* 2004; 69:263-266.
- 2 Yang CC, Maravilla K, Kilbourne-Brook M, Austin G, et al. Magnetic resonance imaging of SILCS diaphragm: anatomical consideration and corroboration with clinical fit. *Contraception* 2007; 76: 238-244.
- 3 Schwartz J, Ballagh S, Creinin M, et al. SILCS diaphragm: postcoital testing of a new single-size contraceptive device. *Contraception* 2008; 78:237-244.
- 4 Schwartz J, Weiner D, Lai JJ, et al. Contraceptive efficacy, safety, fit, and acceptability of a single-size diaphragm developed with end-user input. *Obst Gynecol.* 2015. Apr, 125(4):895-903.
- 5 Vessey, M., Wiggins P.: Use effectiveness of the diaphragm in a selected family planning clinic population in the United Kingdom. *Contraception* 9 (1974) 15-22.