

Caya[®] contoured diaphragm – Das innovative Barriere-Verhütungsmittel

Caya[®] contoured diaphragm

Hormonfrei.
Sicher.
Leicht anzuwenden.

Passt ohne Anpassen!*



PZN 14017375
Preis: 39,95 € UVP



*bei 87% aller Frauen

Caya[®] diaphragm gel



Verhütungsgel auf der
Basis von Milchsäure
und Zellulose.

PZN 02950119
Preis: 9,95 € UVP

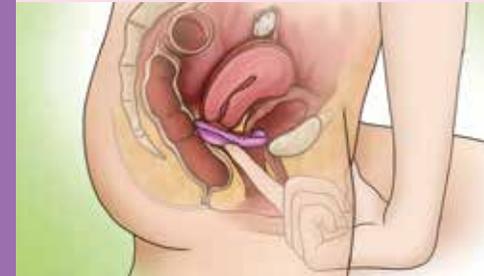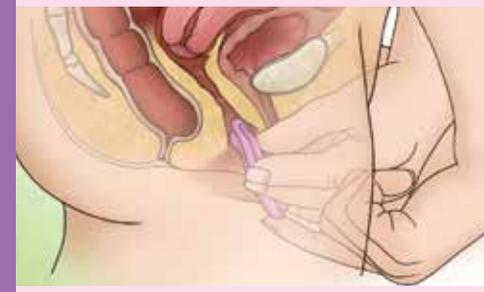

Wie funktioniert Caya[®] Diaphragma?

- wird wie ein Tampon in die Scheide eingeführt und bedeckt die Zervix
- liegt zwischen dem hinteren Scheidengewölbe und der Nische dicht hinter dem Schambein
- wirkt als mechanische Barriere, die das Eindringen der Spermien in den Muttermund verhindert
- durch die besondere Form lässt sich Caya[®] leicht und sicher platzieren
- ein Anpassen des Diaphragmas entfällt

Dreifache Sicherheit:

- Silikonmembran: mechanische Barriere
- im Verhütungsgel enthaltene Zellulose: zusätzliche mechanische Barriere am Muttermund
- saurer pH-Wert und Viskosität des Gels: motilitätshemmenden Effekt auf Spermatozoen

Wichtig:


Caya[®] ist immer in Kombination mit einem Verhütungsgel (z. B. Caya[®] Gel) anzuwenden.

Kontraindikationen:


- 6 Wochen post partum
- falls bisher beim Diaphragma 60mm und kleiner oder 85mm und größer verwendet wurde
- ausgeprägte Deszensus uteri et vaginae
- Zystozele mit Aufhebung der retropubischen Nische in der Vagina
- wenig ausgeprägte oder fehlende retropubische Nische

Fragen oder Anregungen unter:
service@medintim.de | Tel. (06105) 20 37 20

Caya[®] *contoured diaphragm* – Die richtige Positionierung des Diaphragmas

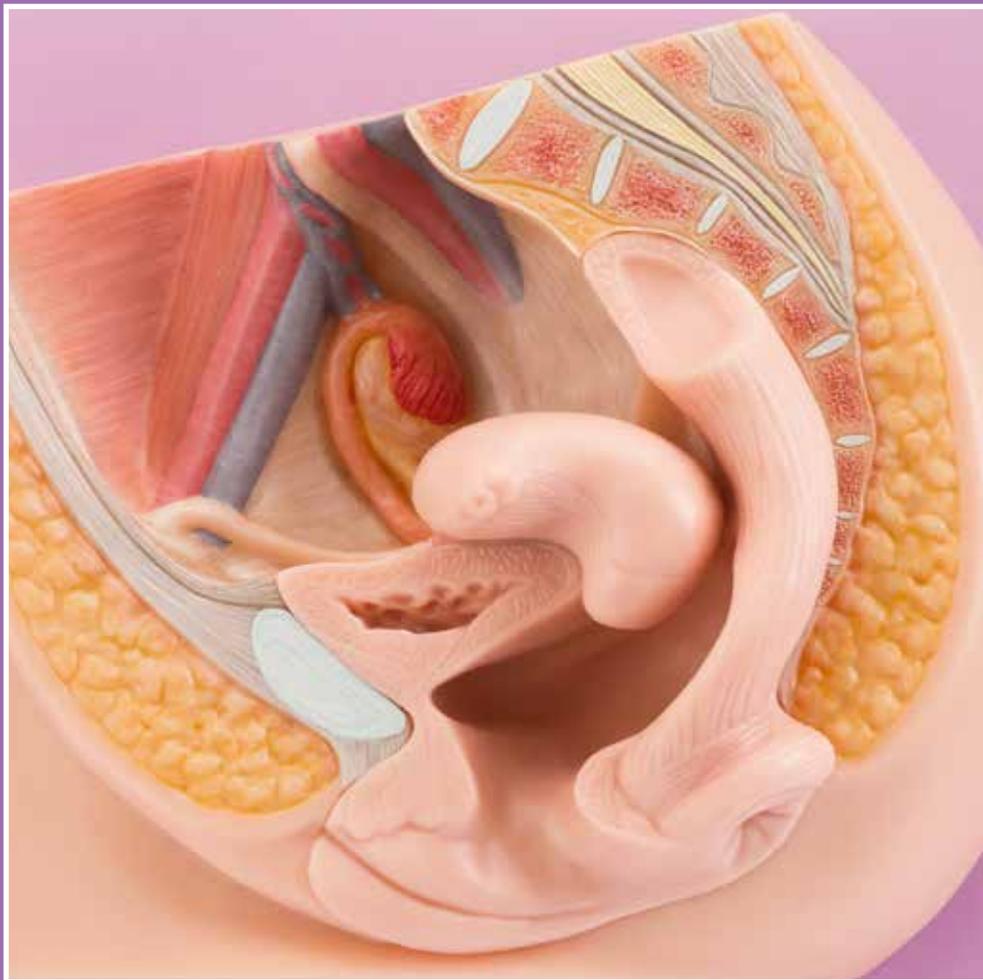

Caya[®] Pelvic Model

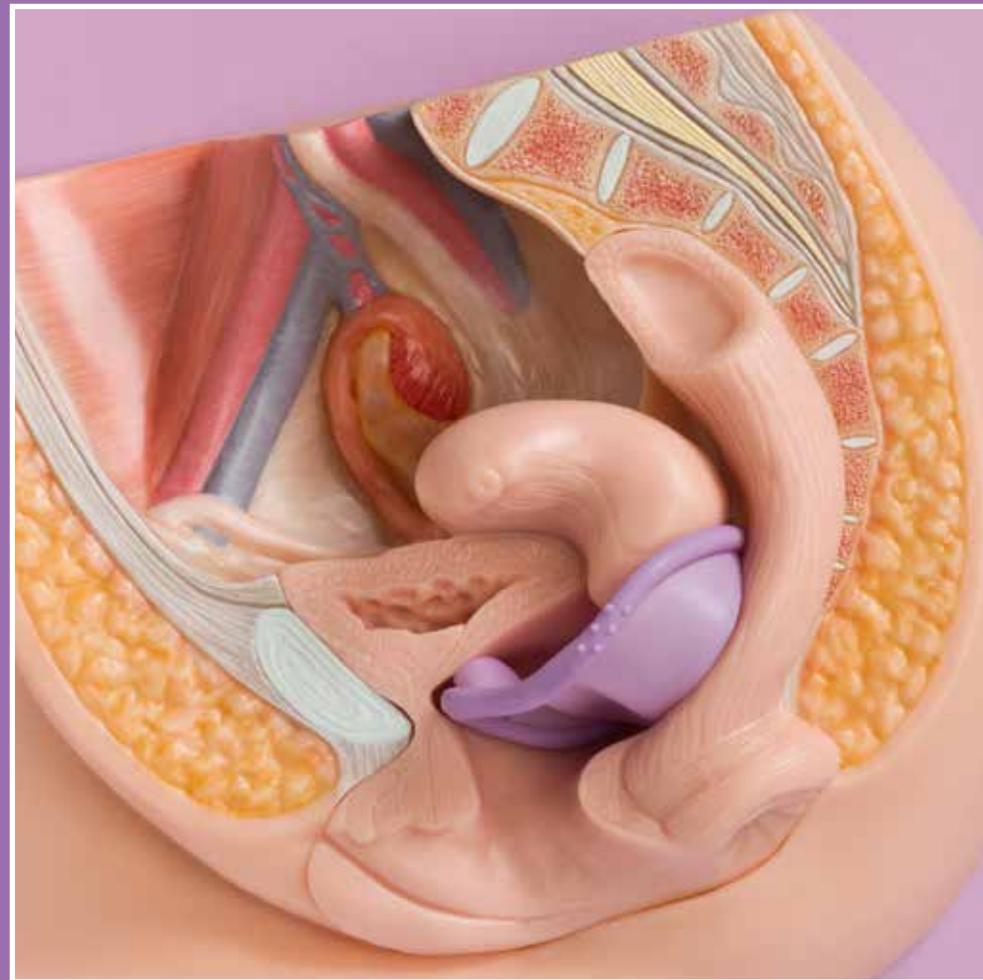

Caya[®] Pelvic Model mit liegendem Caya[®] Diaphragma



KESSEL medintim GmbH
Nordendstraße 82-84
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
www.medintim.de

Tel. (06105) 20 37 20
Fax (06105) 20 37 221
E-Mail: service@medintim.de



Weitere Informationen und
Video zur Anwendung unter:
www.caya.eu



MEDintim
personal healthcare