



MEDintim
personal healthcare



Contragel® grün

Kontrazeptives Gel zur Verhütung mit Diaphragmen oder Portiokappen

Contragel® grün ist ein kontrazeptives Gel zur Anwendung mit den Verhütungsmitteln Diaphragma oder Portiokappe. Die Sicherheit dieser Verhütungsmethoden wird durch die Verwendung von **Contragel® grün** erhöht.

Anwendung

Vor dem Einführen des Diaphragmas oder der Portiokappe geben Sie ca. einen Teelöffel voll (ca. 4 ml) **Contragel® grün** in das Diaphragma oder die Portiokappe. Beachten Sie hierzu auch die Gebrauchsanweisung Ihres Diaphragmas oder Ihrer Portiokappe.

Wirkungsweise

Contragel® grün bildet mittels Zellulose (Gelbildner) eine zusätzliche mechanische Barriere vor dem Muttermund. Die enthaltene Milchsäure senkt den vaginalen pH-Wert ab. Der erhöhte Säuregrad und die Viskosität des Gels haben einen motilitäts-hemmenden Effekt auf die Spermatozoen.

Das Produkt wird in dieser Zusammensetzung seit 1972 hergestellt. Eine industrieunabhängige Untersuchung durch das Forschungsinstitut CONRAD (www.conrad.org) bestätigte zuletzt in 2017 die Wirksamkeit von Contragel® grün.* Diese Studie belegt, dass Contragel® grün zusammen mit dem Caya® Diaphragma sicher und im Vergleich genauso wirksam wie Caya® mit Nonoxynol-9 haltigen Gels ist.

* Mauck Christine K., Brache Vivian, Kimble Thomas, Thurman Andrea, Cochon Leila, Littlefield Sarah, Linton Kim, Doncel Gustavo F., Schwartz Jill L., A Phase I Randomized Postcoital Testing and Safety Study of the Caya Diaphragm used with 3% Nonoxynol-9 gel, ContraGel, or No Gel, Contraception (2017)

Hinweis:

- **Contragel® grün** bietet keinen Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten
- **Contragel® grün** ohne Diaphragma oder Portiokappe angewandt, bietet keinen Verhütungsschutz
- wasserlöslich und verträglich mit Kondomen aus Naturkautschuk oder Polyurethan

Inhaltsstoffe:

Wasser, Milchsäure, Natriumlactat, Zellulose, Sorbinsäure, Vanillin

Inhalt:

60 g Gel

Lagerung: 4°C 25°C

Kühl und trocken lagern. Tube immer geschlossen halten. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

In Apotheken, im Fachhandel oder direkt über KESSEL MEDintim erhältlich.

PZN 04116596
EAN 40 13273 000208

DeltaMed GmbH
Raiffeisenstr. 8a
61169 Friedberg
Germany

0124

Medizinprodukt
Made in Germany

Weltweite Vertriebsrechte:



KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82 – 84
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20
Fax (06105) 20 37 221
E-Mail: service@medintim.de

www.medintim.de