

THE SMART CONTRACEPTION



**MEDintim**  
personal healthcare



¡Desarrollado  
por mujeres para  
mujeres!



# Caya<sup>®</sup> *contoured diaphragm*

## Diafragma de silicona para la anticoncepción

El Diafragma **Caya<sup>®</sup>** es un nuevo anticonceptivo de barrera para las mujeres - fácil de usar y sin hormonas. Actúa como barrera mecánica en el cuello uterino. **Caya<sup>®</sup>** evita la penetración de los espermatozoides en el útero durante el coito.

### Indicaciones:

- Para las mujeres,
- que quieren o deben prevenir el embarazo sin usar hormonas (p. ej. en caso de elevado riesgo de trombosis)
- que no quieren o no deben utilizar el DIU
- durante la lactancia
- que solo quieren utilizar el método anticonceptivo cuando mantienen relaciones sexuales
- después del parto o entre dos embarazos
- que tienen alergia al látex
- en combinación con métodos naturales para la planificación familiar (p. ej. método sintotérmico)

### Propiedades:

- Sin hormonas
- Fácil de manipular
- Sin efectos secundarios
- Reutilizable: durante 2 años
- Sin látex
- No requiere ningún ajuste
- Ecológico y económico
- No afecta a las sensaciones sexuales de la pareja
- Se usa sólo cuando se necesita

### Utilización:

- Antes de iniciar la relación sexual, se introduce en la vagina como un tampón
- Cubre el cuello uterino por completo
- Se encuentra entre el fondo de saco vaginal posterior y el pubis

### Contraindicaciones

- Utilización en las primeras 6 semanas después del parto
- Si se ha utilizado un diafragma convencional más pequeño de 60 mm o más grande de 85 mm
- En caso de fuerte descenso del piso pélvico
- No utilizar el diafragma con un lubricante de aceite de silicona (Dimeticon)

### Observación

- Se recomienda usar siempre el Diafragma **Caya<sup>®</sup>** en combinación con un gel anticonceptivo (p. ej. **Caya<sup>®</sup> Gel**)
- **Caya<sup>®</sup>** NO protege contra las enfermedades de transmisión sexual.
- El Diafragma **Caya<sup>®</sup>** está disponible mediante receta a través del distribuidor

### Material

- Silicona de uso médico, Nylon<sup>®</sup>


### Contenido

- Un Diafragma **Caya<sup>®</sup>**
- Manual de instrucciones
- Estuche para guardar el diafragma

### Limpieza

- Con agua y jabón

EAN 4013273001854

 KESSEL medintim GmbH  
Kelsterbacher Str. 28  
64546 Moerf.-Walldorf  
Deutschland

 0483  
Producto sanitario  
Made in Germany

Distribuidor en Chile:  
Dolphin Medical  
Callao #2970 Of. 806  
Las Condes, Santiago  
Chile

Para mayor información:  
ventas@dolphinmedical.com  
Tel. +56 2 2952 0165  
www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical

www.caya.eu