




**MEDintim**  
personal healthcare

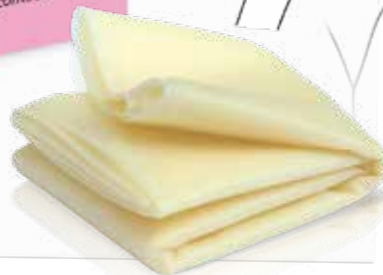

# Oralsafe

Latexschutztuch für oral-genitale Kontakte

**Oralsafe** ist ein Latexschutztuch, zur Anwendung bei oral-genitalem Kontakt.

## Anwendung:

Nehmen Sie das Latextuch vorsichtig aus der Umhüllung. Befeuchten Sie die Scheiden- oder Analregion mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis. Legen Sie **Oralsafe** über den Scheideneingang und die Klitoris, bzw. über den Analbereich. Halten Sie das Tuch während des oralen Verkehrs in seiner Lage fest. Das benutzte Tuch gehört in den Hausmüll. Bitte nicht in die Toilette werfen.

## Wichtige Hinweise:

Benutzen Sie ein neues **Oralsafe**, wenn Sie zwischen den Bereichen wechseln. Zerteilen Sie die Tücher nicht und verwenden Sie jedes nur einmal! Wenn Sie oder Ihr/e Partner/in ein Medikament im Genitalbereich verwenden, klären Sie bitte mit Ihrem Arzt die Verträglichkeit von **Oralsafe**. Bei bestehender Latexunverträglichkeit kann **Oralsafe** eine allergische Reaktion auslösen und sollte daher nicht verwendet werden.

## Inhaltsstoffe:

Naturkautschuklatex

## Inhalt:

8 x 1 Stk. Latextuch zur einmaligen Verwendung, lieferbar mit Vanille- bzw. Erdbeeraroma  
Größe: 252 x 115 mm  
Farbe: beige  
Faltschachtel: 65 x 93 x 19 mm

## Lagerung:

Kühl und trocken lagern.  
Vor direktem Sonnenlicht (UV) schützen.

In Apotheken, im Fachhandel oder direkt über KESSEL MEDintim erhältlich.

## Erdbeer

EAN 4013273900164  
PZN 07610724

## Vanille

EAN 4013273900171  
PZN 07610687



KESSEL medintim GmbH  
Nordendstr. 82-84  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20  
Fax (06105) 20 37 221  
E-Mail: [service@medintim.de](mailto:service@medintim.de)

[www.medintim.de](http://www.medintim.de)