
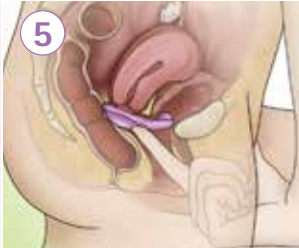









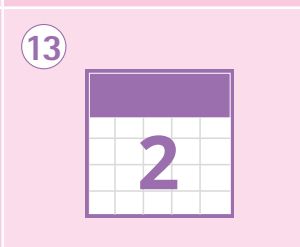

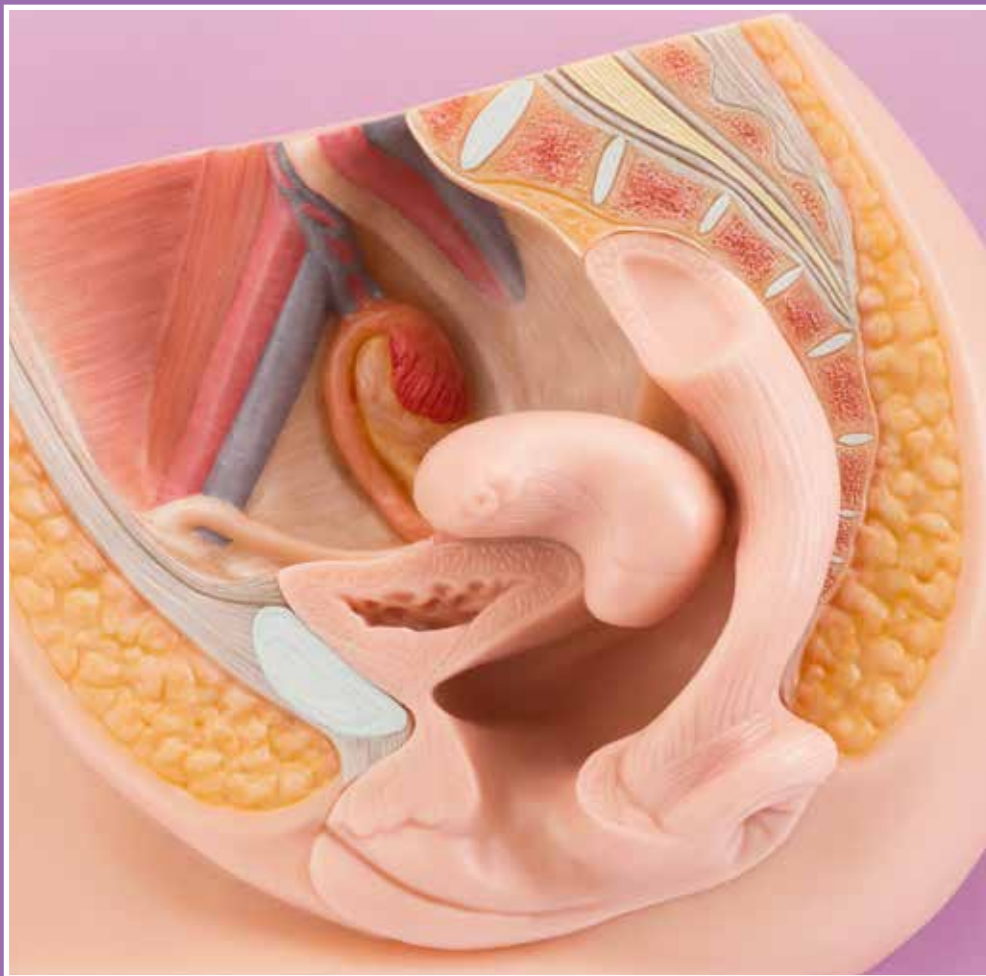


Caya[®] *contoured diaphragm*

Guía rápida para un uso sencillo y seguro

	<p>1 El Diafragma Caya[®] se coloca justo antes de mantener relaciones sexuales. Antes de introducirlo es preciso doblarlo por las prominencias para el agarre marcadas en el Diafragma. Aplicar unos 4 ml (aprox. una cucharadita) de gel anticonceptivo (Gel Caya[®]) en la hendidura de la membrana.</p>		<p>5 El Diafragma Caya[®] está correctamente colocado si cubre por completo el cuello uterino o cérvix y se encuentra entre el fondo de saco vaginal posterior y el pubis.</p>		<p>10 Después de retirar el Diafragma Caya[®] de la vagina lavararlo con agua y jabón y dejar que se seque en el estuche abierto.</p>
	<p>2 Distribuir una pequeña cantidad del gel por los bordes del diafragma. De este modo resultará más fácil introducirlo en la vagina.</p>		<p>6 Después de introducir el diafragma comprobar su colocación con el dedo. La colocación es correcta cuando se puede palpar el cuello uterino a través de la membrana este se siente como "la punta de la nariz". Si no es así, retirar el diafragma e introducirlo de nuevo.</p>		<p>11 El Diafragma Caya[®] debe guardarse siempre en el estuche incluido para protegerlo de las influencias externas.</p>
	<p>3 Sujetar el diafragma con una mano. Al introducirlo, la flecha debe apuntar hacia el cuerpo.</p>		<p>7 Dejar el diafragma en la vagina si se van a repetir las relaciones sexuales. Para garantizar la seguridad en el siguiente encuentro sexual, introducir directamente con el aplicador vaginal 4ml de Caya[®] gel.</p>		<p>12 Importante: el Diafragma Caya[®] nunca debe dejarse dentro de la vagina durante más de 24 horas.</p>
	<p>4 El Diafragma Caya[®] debe deslizarse más allá de la porción vaginal del cérvix hasta el fondo de saco posterior. La concavidad para extraer el diafragma ocupa el espacio retro púbico por completo.</p>		<p>8 El diafragma debe permanecer dentro de la vagina por lo menos 6 horas desde la última eyacuación. (De lo contrario, los espermatozoides móviles pueden ascender por el conducto cérvico uterino sin protección.)</p>		<p>13 La vida útil del Diafragma Caya[®] es de dos años a partir del primer uso.</p>
	<p>9 A continuación, el Diafragma Caya[®] se retira de la vagina tirando de él por la concavidad para la extracción.</p>	<p>Para mayor información: email: ventas@dolphinmedical.com Tel: + 56 2 2952 0165</p>			

Caya[®] *contoured diaphragm* – El posicionamiento correcto del diafragma



Modelo pélvico Caya[®]



Modelo pélvico Caya[®] con el diafragma insertado



KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
www.medintim.de

www.caya.eu



Distribuidor en Chile:
Dolphin Medical
Callao #2970 Of. 806
Las Condes, Santiago
Chile

Tel. +56 2 2952 0165
www.dolphinmedical.com



Dolphin Medical