



MEDintim
personal healthcare



ACTIVE *Erection System*^{NT}®

Vakuum-Erektionshilfe bei erektiler Dysfunktion

elektronisch geregelt, spritzwassergeschützt,
leicht zu reinigen

Anwendung:

Das **ACTIVE *Erection System*^{NT}®** ist ein medizinisches Hilfsmittel, um eine Erektion zu erlangen. Die Vakuumpumpe bewirkt einen Unterdruck im Zylinder um den Penis. Hierdurch füllen sich die Schwellkörper mit Blut und führen zu einer Versteifung des Gliedes. Nun wird einer der Stauringe über den Penis gestreift. Er verhindert beim Abnehmen des Zylinders den Rückfluss des Blutes und hält dadurch die Erektion aufrecht. Mit der so gehaltenen Erektion ist ein normaler und befriedigender Geschlechtsverkehr möglich.

Das **ACTIVE *Erection System*^{NT}®** lässt sich leicht mit warmem Wasser reinigen. Alle Teile, auch die Stauringe in vier verschiedenen Größen, können auch nach Jahren noch nachbestellt werden. 2 Jahre Garantie besteht auf den Pumpenkopf (Motor). Alle Teile können in der mitgelieferten Tasche aufbewahrt werden.

Das **ACTIVE *Erection System*^{NT}®** ist ein von den Krankenkassen anerkanntes Hilfsmittel und kann vom Arzt verordnet werden.

Häufige Ursachen von Erektionsstörungen sind:

- Diabetes (erhöhter Blutzucker)
- Bluthochdruck
- Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose)
- erhöhte Blutfettwerte
- Depressionen (oder andere seelische Erkrankungen)
- neurologische Krankheiten (Multiple Sklerose, Querschnittslähmung)
- Operation der Prostata
- Gefäßerkrankungen der Schwellkörper des Penis
- Nieren- und Leberinsuffizienz
- Herzinfarkt und Schlaganfall
- Medikamente (z. B. gegen Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen, Blutfettsenker, Entzündungshemmer, Antidepressiva und zur Entwässerung)
- Rauchen und Alkoholmissbrauch

Das **ACTIVE *Erection System*^{NT}®** besteht aus:

- Elektr. Vakuumpumpe mit drei AAA Batterien
- transparenter Zylinder (202 mm lang, 53 mm Ø Innen)
- Stauringführungshülse 1 und 2
- Konus
- 4 verschiedene Stauringe (10, 12,5, 15 und 20 mm Innendurchmesser)
- Animé Gleitmittel 50 ml
- Gebrauchsanweisung
- Tasche zur Aufbewahrung
- DVD mit Gebrauchsanweisung und Anwendungsbildern

PZN 08413888

Hilfsmittel-Pos. Nr. 99.27.02.0017

EAN: 4013273000116

Art. Nr.: AES 01

Made in Germany

CE 0483
Medizinprodukt



KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82-84
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel.: 06105 20 37 20
Fax: 06105 20 37 221
E-Mail: service@medintim.de

www.medintim.de