

# Caya<sup>®</sup>

*contoured diaphragm*

THE SMART CONTRACEPTION



PZN 14017375  
Preis: 39,95€ UVP



# Caya<sup>®</sup>

*diaphragm gel*

PZN 02950119  
Preis: 9,95€ UVP



Rezeptfrei erhältlich in Apotheken, im Fachhandel oder direkt unter [www.medintim-shop.de](http://www.medintim-shop.de)

# Caya<sup>®</sup>

*contoured diaphragm*

Hormonfrei.  
Sicher.  
Leicht anzuwenden.

Passt ohne Anpassen.

  
KESSEL MEDintim GmbH  
Nordendstr. 82 - 84  
64546 Mörfelden-Walldorf  
Germany  
Tel: +49 (0) 6105 20 37 20  
[www.medintim.com](http://www.medintim.com)

Made in Germany


 0483  
Medizinprodukt

Weitere  
Informationen  
[www.caya.eu](http://www.caya.eu)



# Caya<sup>®</sup> contoured diaphragm

Das neue Diaphragma: anatomisch geformt!

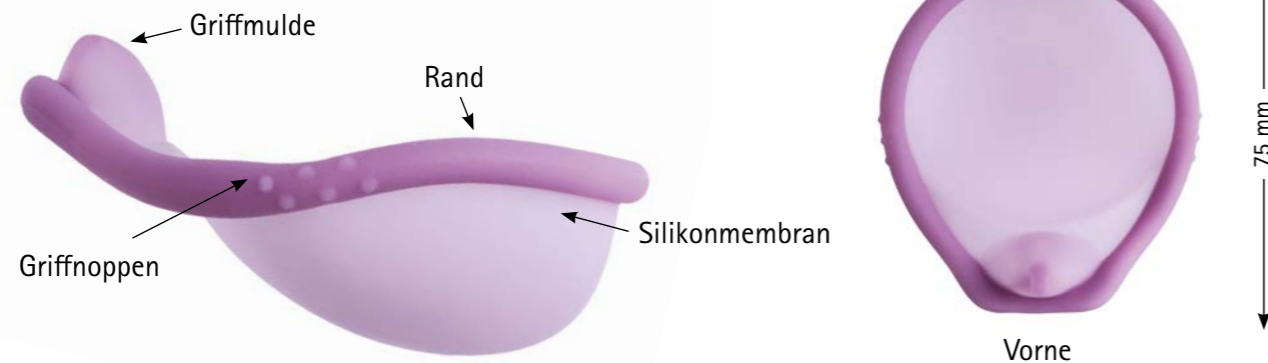

Das Caya<sup>®</sup> contoured diaphragm ist ein neu entwickeltes Barriere-Verhütungsmittel.

Es ist anatomisch und ergonomisch geformt und passt daher den meisten Frauen.<sup>1</sup>

- **Silikonmembran:** hauchdünn, bedeckt die Zervix vollständig. Beim Sex nicht zu spüren.
- **Rand:** flexibel, verleiht dem Diaphragma Stabilität und unterstützt das Einführen des Diaphragmas in die Scheide. Der Rand sorgt für den Halt und gewährleistet die richtige Positionierung des Diaphragmas.
- **Griffknoppen:** Orientierungshilfe für das Einführen. An diesen Stellen wird das Diaphragma mit leichtem Fingerdruck gefaltet.
- **Griffmulde:** erleichtert das Entfernen des Diaphragmas aus der Scheide.

## Kein Anpassen mehr!

Die ovale und an das Scheidengewölbe angepasste Form macht das bisherige Anpassen eines Diaphragmas überflüssig.

### Indikation:

Das Caya<sup>®</sup> Diaphragma ist ein Verhütungsmittel für alle Frauen, die natürlich und sicher verhüten wollen.

Es ist besonders geeignet:

- wenn hormonfreie Verhütung erwünscht oder medizinisch erforderlich ist (z. B. erhöhtes Thromboserisiko)
- wenn IUD nicht erwünscht oder kontraindiziert
- in der Stillzeit
- bei Wunsch nach selbstbestimmter Verhütung
- bei Latexallergie
- zwischen zwei Schwangerschaften
- in Kombination mit natürlichen Methoden der Empfängnisverhütung (z. B. symptothermale Methode)

### Sicherheit:

#### Dreifache Sicherheit:

- Silikonmembran: mechanische Barriere
- im Verhütungsgel enthaltene Zellulose: zusätzliche mechanische Barriere am Muttermund
- saurer pH-Wert und Viskosität des Gels: motilitätshemmender Effekt auf Spermatozoen

Studien haben gezeigt, dass Sicherheit und Compliance zunehmen, je länger und häufiger Frauen ein Diaphragma zur Verhütung verwenden.<sup>5</sup>

#### Kontraindikationen:

- 6 Wochen post partum
- falls bisher beim Diaphragma 60mm und kleiner oder 85 mm und größer verwendet wurde
- ausgeprägte Deszensus uteri et vaginae
- Zystozele mit Aufhebung der retropubischen Nische in der Vagina
- wenig ausgeprägte oder fehlende retropubische Nische

## Wie funktioniert das Caya<sup>®</sup> Diaphragma?

- wird wie ein Tampon in die Scheide eingeführt
- liegt zwischen dem hinteren Scheidengewölbe und der Nische am Schambein
- bedeckt die Zervix vollständig
- wirkt als mechanische Barriere gegen die Migration von Spermien in den Uterus

Caya<sup>®</sup> ist immer in Kombination mit einem kontrazeptiven Gel (z. B. Caya<sup>®</sup> Gel) anzuwenden.

Video zur Anwendung unter: [www.caya.eu](http://www.caya.eu)



## Vorteile des Caya<sup>®</sup> Diaphragmas

- hormonfrei
- eine Größe passend für die meisten Frauen
- sicher und verlässlich
- einfache Handhabung
- keine Nebenwirkungen
- selbstkontrollierte Verhütungsmethode
- beim Sex nicht zu spüren
- der weiblichen Anatomie entsprechend geformt
- latexfrei
- ökologisch, da wiederverwendbar
- ökonomisch: kann zwei Jahre verwendet werden
- keine Beeinträchtigung sexueller Empfindungen beider Partner


## Caya<sup>®</sup> – Sicherheit, einfache Anwendung und Tragekomfort wurde in klinischen Studien bewiesen.

Studien haben gezeigt, dass Sicherheit und Compliance zunehmen, je länger und häufiger Frauen ein Diaphragma zur Verhütung verwenden.<sup>5</sup>

Form und Funktion von Caya<sup>®</sup> wurden in mehreren unabhängigen Studien<sup>1-4</sup> in den USA ermittelt und geprüft. In einer klinischen Multicenter-Studie<sup>4</sup> von CONRAD ([www.conrad.org](http://www.conrad.org)) wurde an zehn Zentren in den USA mit 450 Paaren die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit, Sicherheit, Akzeptanz dieser Verhütungsmethode sowie die Passgenauigkeit untersucht:

### ERGEBNIS:

Das Caya Diaphragma ist so sicher und effektiv wie ein herkömmliches Diaphragma. Die 6-Monats-Schwangerschaftswahrscheinlichkeit nach Kaplan-Meier beträgt 10,4 %. Dieser Wert ist nicht mit dem Pearl-Index gleichzusetzen, welcher eine langfristig ermittelte Methodensicherheit definiert. Der Pearl-Index der Methode "Diaphragma" ist vergleichbar mit dem von Kondomen für Männer aus Naturkautschuklatex.

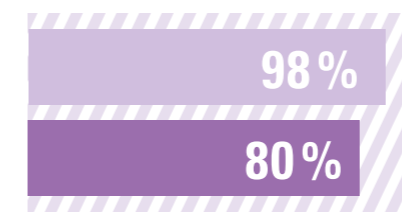

■ Das Caya<sup>®</sup> Diaphragma war für 98 % der Probandinnen (439 / 450) geeignet.

■ Fast 80% der Probandinnen konnten das Caya<sup>®</sup> beim ersten Versuch richtig positionieren, den Sitz korrekt überprüfen und entfernen, nachdem sie nur die Gebrauchsanweisung gelesen hatten – ohne die Hilfe eines Arztes oder medizinischen Fachpersonals.

Nach zusätzlicher Hilfestellung durch einen Arzt war das Diaphragma bei 94% der Studienteilnehmerinnen in der richtigen Position.

### Referenzen

- 1 Mauck C, Lai JJ, Schwartz J, Weiner D, et al. Diaphragms in clinical trials: is clinician fitting necessary? Contraception 2004; 69:263-266.
- 2 Yang CC, Maravilla K, Kilbourne-Brook M, Austin G, et al. Magnetic resonance imaging of SILCS diaphragm: anatomical consideration and corroboration with clinical fit. Contraception 2007; 76: 238-244.
- 3 Schwartz J, Ballagh S, Creinin M, et al. SILCS diaphragm: postcoital testing of a new single-size contraceptive device. Contraception 2008; 78:237-244.
- 4 Schwartz J, Weiner D, Lai JJ, et al. Contraceptive efficacy, safety, fit, and acceptability of a single-size diaphragm developed with end-user input. Obst Gynecol. 2015. Apr; 125(4):895-903.
- 5 Vessey, M., Wiggins P.: Use effectiveness of the diaphragm in a selected family planning clinic population in the United Kingdom. Contraception 9 (1974) 15-22.