

Animé Lubricant^N

Gleitmittel mit Hyaluron

- geruchsneutral
- wasserlöslich
- farblos / macht keine Flecken
- hinterlässt keine Rückstände
- frei von Parabenen und Silikonen
- dermatologisch getestet
- fördert die Wundheilung
- lindert Trockenheit
- sehr gute Hautverträglichkeit
- verträglich mit Kondomen aus Naturkautschuklatex, Polyurethan und Polyisopren

Bitte beachten Sie!

Anwendungshinweis bei Kinderwunsch:

Ein saurer pH-Wert der Scheide beeinträchtigt die Spermien und damit die Fruchtbarkeit. Animé Lubricant^N sollte bei Kinderwunsch während der Ovulation nicht verwendet werden, da es einen pH-Wert von 3,5 bis 4,5 hat.

Paaren mit Kinderwunsch empfehlen wir in dieser Phase Prefert[®] Vaginal Gel als Gleitmittel zum Optimieren der Fruchtbarkeit. Prefert[®] Vaginal Gel ist ebenfalls in Apotheken (PZN 11483154) erhältlich.

Das Animé Lubricant^N Gleitmittel ist in Apotheken, im Fachhandel oder direkt über *KESSEL MEDintim* unter www.medintim-shop.de erhältlich.

Inhaltsstoffe:
Gereinigtes Wasser, Propylenglycol, Glycerol, Hydroxyethylzellulose, Benzoesäure, Natriumhyaluronat

Eigenschaften:
Viskosität haftend, nicht fließend, pH-Wert 3,5 bis 4,5

Frei von Parabenen, Silikonen und tierischen Bestandteilen. Dermatologisch getestet. Wasserlösliches Gleitmittel.

Zur äußerlichen Anwendung.



50 ml Tube
REF: Gel Anime N
PZN: 13366406
EAN: 4013273001816

Sachet 4 ml
REF: Gel Ani Sam
EAN: 4013273001748

Made in Germany



Medizinprodukt

Mehr Informationen unter www.animelube.com



KESSEL MEDintim GmbH
Nordendstr. 82 - 84
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20
Fax (06105) 20 37 221
E-Mail: service@medintim.de

www.medintim.de



Mit Hyaluron

Animé Lubricant^N

MEDintim Gleitmittel
zum täglichen Gebrauch
für SIE und IHN



MEDintim
www.animelube.com

Geeignet für SIE und IHN



Animé Lubricant^N spendet Feuchtigkeit und kann so das Lustempfinden beim Geschlechtsverkehr steigern.

Seine Zusammensetzung mit Hyaluron macht es gut verträglich und fördert die Feuchtigkeit bei gleichzeitiger Pflege der oberen Hautschichten. Es hinterlässt keinerlei Flecken auf der Haut oder Stoffen, ist zudem wasserlöslich, farblos und geruchsneutral sowie frei von Parabenen und Silikonen.

Zur vaginalen Anwendung geeignet. Gut verträglich mit Kondomen aus Naturkautschuklatex, Polyurethan und Polyisopren sowie Hilfsmitteln und Produkten zur sexuellen Stimulation.

Anwendung nur äußerlich.

Wie ist Animé Lubricant^N anzuwenden?

Die Anwendung von Animé Lubricant^N ist denkbar einfach: Die individuell benötigte Menge wird direkt auf die Haut aufgetragen oder mittels Finger an die gewünschte Stelle gebracht. Dort sorgt Animé Lubricant^N für eine rasche Befeuchtung, Linderung von unangenehmen Reizungen und eine verbesserte Gleitfähigkeit. Es ist für die vorübergehende und äußerliche Anwendung gedacht.




„Animé Lubricant^N hilft, spendet Feuchtigkeit und fördert den Spaß im Liebesleben.“

Warum ein Gleitmittel mit Hyaluron?

Hyaluron ist eine körpereigene Substanz und gehört zu den wichtigsten Strukturelementen in unserer Haut. Es verleiht Geweben und Organen ihre Form, gibt Elastizität und dient gleichzeitig als Wasserspeicher. Chemisch gesehen ist es ein sogenanntes Polysaccharid (komplexer Zucker) und befindet sich zwischen den Gewebezellen.

Hyaluron sorgt dafür, dass Wasser und Nährstoffe ins Gewebe gelangen. Da es bis zum 6000-fachen des Eigenvolumens an Wasser aufnehmen kann, ist es für die Feuchtigkeitsregulierung des Gewebes von großer Bedeutung. Das Auftragen von Hyaluron hält die Haut stabil und elastisch, auch und vor allem das vaginale Bindegewebe.

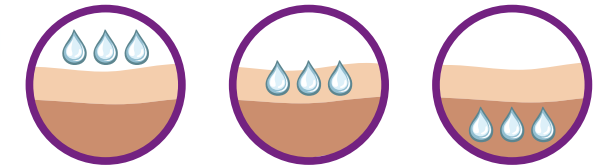

Zudem unterstützt Hyaluron aktiv den Wundheilungsprozess der Haut. Seit Jahren wird es ebenso in der Kosmetik, bei Brandwunden und bei Kniegelenksbehandlungen eingesetzt. Dort werden unangenehmes Brennen und Jucken gelindert und auch Infektionen treten seltener auf. Allergien im Zusammenhang mit Hyaluron sind bislang keine bekannt.

