

Caya® passt auch zu Ihnen.

Das Caya® Diaphragma ist ein Verhütungsmittel für alle Frauen, die natürlich und sicher verhüten wollen.

Es ist **besonders** geeignet für Frauen:

- die hormonfrei verhüten wollen oder müssen (z. B. bei erhöhtem Thromboserisiko)
- die keine Spirale benutzen wollen oder dürfen
- in der Stillzeit
- die nur dann verhüten wollen, wenn sie Sex haben
- nach einer Entbindung / zwischen zwei Schwangerschaften
- die eine Latexallergie haben
- in Kombination mit natürlichen Methoden der Familienplanung (z. B. symptothermale Methode)

Kontraindikationen:

- innerhalb der ersten 6 Wochen nach einer Entbindung
- bei starker Absenkung des Beckenbodens / Gebärmutter-senkung
- wenn beim herkömmlichen Diaphragma 60 mm und kleiner oder 85 mm und größer benutzt wurde

Hinweis:

Caya® schützt nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Das Caya® Diaphragma ist frei verkäuflich in Apotheken erhältlich.

Es wird empfohlen Caya® immer in Kombination mit dem kontrazeptiven Caya® Gel anzuwenden.

Vorteile vom Caya® Diaphragma

- hormonfrei
- einfache Handhabung – vergleichbar mit einem Tampon
- keine Nebenwirkungen
- wiederverwendbar: 2 Jahre lang
- latexfrei
- kein Anpassen erforderlich
- ökologisch und ökonomisch
- keine Beeinträchtigung sexueller Empfindungen beider Partner
- immer nur dann anzuwenden, wenn es notwendig ist
- zusammen mit dem Verhütungsgel bietet es **dreifache Sicherheit:**
 - 1 Silikonmembran als mechanische Barriere
 - 2 Zellulose im Verhütungsgel als zusätzliche mechanische Barriere
 - 3 saurer pH-Wert (3,8) und Viskosität des Verhütungsgels hemmen die Motilität der Spermien

Das Caya® Diaphragma erhalten Sie zusammen mit:

- Gebrauchsanleitung
- Aufbewahrungsdose



Caya®

contoured diaphragm

PZN 14017375
Preis: 39,95 € UVP



Caya®

diaphragm gel

PZN 02950119
Preis: 9,95 € UVP



Erhältlich in Apotheken, im Fachhandel oder direkt unter www.medintim-shop.de



Hormonfrei.
Sicher.
Leicht anzuwenden.

Caya®

contoured diaphragm

THE SMART CONTRACEPTION



KESSEL MEDintim GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany
www.medintim.de

Weitere
Informationen
www.caya.eu



<https://www.facebook.com/cayadiaphragm>




CE 0483
Medizinprodukt

Info-/Servicetelefon: 06105-203720

cay 11.02.2019 10.02.2019

Caya[®] contoured diaphragm

Verhüten mit dem Caya[®] Diaphragma

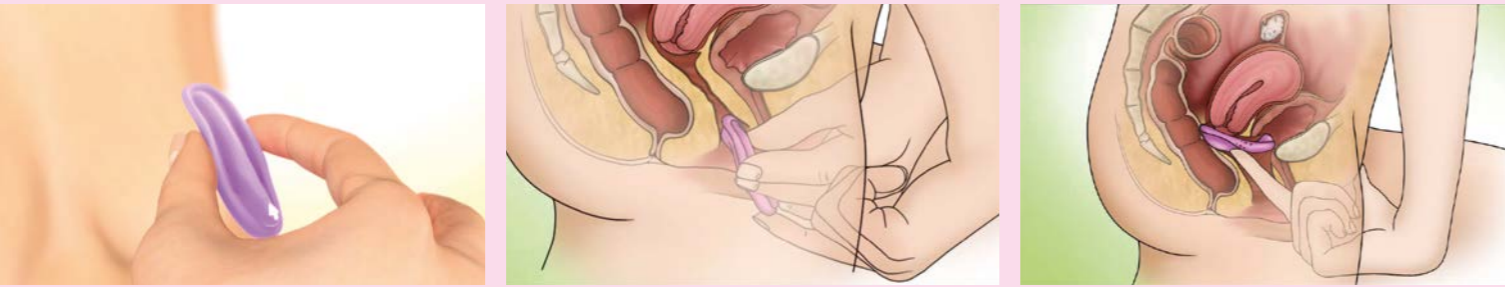

Viele Frauen wünschen sich eine natürliche und sichere Verhütung – ohne Hormone!

Mit dem neuen **Caya[®]** Diaphragma verhüten Sie sicher und selbstbestimmt, dann wenn Sie es brauchen. **Caya[®]** wird vor dem Sex wie ein Tampon in die Scheide eingeführt. Es bedeckt den Muttermund vollständig und liegt zwischen dem hinteren Scheidengewölbe und der Nische am Schambein. Beim und nach dem Sex verhindert **Caya[®]** das Eindringen von Spermien in die Gebärmutter. Nach dem Verkehr muss das **Caya[®]** Diaphragma mindestens 6 Stunden in der Scheide verbleiben.

Weitere Informationen und Video zur Anwendung unter:
www.caya.eu

 <https://www.facebook.com/cayadiaphragm>

Dreifache Sicherheit mit Caya[®]

Caya[®] Diaphragma und Caya[®] Gel garantieren Sicherheit

- 1 Die Silikonmembran ist die mechanische Barriere direkt vor dem Muttermund. Der feste Rand des **Caya[®]** Diaphragmas schließt den Muttermund sicher ab.
- 2 Das **Caya[®]** Verhütungsgel enthält u. a. auch Zellulose, die eine weitere mechanische Barriere direkt am Muttermund darstellt.
- 3 Durch die enthaltene Milchsäure hat das **Caya[®]** Gel einen sauren pH-Wert, der die Spermien deaktiviert.


Gleichzeitig wirkt sich dieser pH-Wert positiv auf die Vaginalflora aus und schützt vor vaginalen Infektionen.

Sicherheit, die einfache Anwendung und der Tragekomfort von **Caya[®]** wurden in klinischen Studien bewiesen.¹⁻⁴

Was ist neu: die anatomische Form!

Das **Caya[®]** Diaphragma ist ein neues Barriere-Verhütungsmittel.

Es ist anatomisch und ergonomisch geformt und passt daher den meisten Frauen.

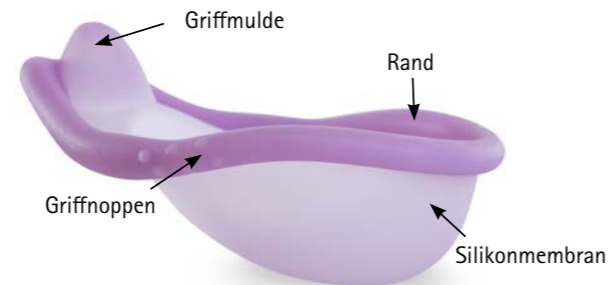

Silikonmembran: bedeckt den Muttermund vollständig, so dass keine Spermien in die Gebärmutter gelangen. Beim Sex nicht zu spüren.

Rand: flexibel, gewährleistet die richtige Positionierung.

Griffknoppen: erleichtern das Einführen in die Scheide. An diesen Stellen wird das Diaphragma mit leichtem Fingerdruck gefaltet.

Griffmulde: zum Herausnehmen aus der Scheide.



Referenzen

- 1 Yang CC, Maravilla K, Kilbourne-Brook M, Austin G, et al. Magnetic resonance imaging of SILCS diaphragm: anatomical consideration and corroboration with clinical fit. *Contraception* 2007; 76:238-244
- 2 Schwartz J, Ballagh S, Creinin M, et al. SILCS diaphragm: postcoital testing of a new single-size contraceptive device. *Contraception* 2008; 78:237-244
- 3 Coffey P, Kilbourne-Brook M, Brache V, Cochón L, et al. Comparative acceptability of the SILCS and Ortho ALL-FLEX[®] diaphragms among couples in the Dominican Republic. *Contraception* 2008; 78:418-423
- 4 Schwartz, Jill e.al 2015 Contraceptive Efficacy, Safety, Fit, and Acceptability of a single-size diaphragm Developed with end-user input.