






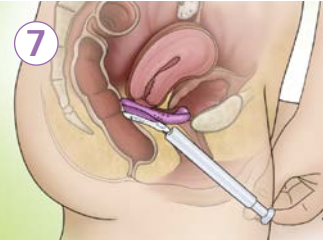


## Krótki przewodnik bezpiecznego i łatwego użytkowania

	<p>1 Diafragmę <b>Caya<sup>®</sup></b> wprowadza się bezpośrednio przed stosunkiem płciowym. Przed wprowadzeniem do pochwy należy złożyć diafragmę <b>Caya<sup>®</sup></b>, ujmując ją za wypustki do umieszczania. W fałdy złożonej membrany należy zaaplikować około 4 ml (mniej więcej jedną łyżeczkę do herbaty) żelu antykoncepcyjnego (<b>Caya<sup>®</sup> Gel</b>).</p>		<p>7 W przypadku ponownego stosunku płciowego diafragmę należy pozostawić w pochwie. W celu zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa przed drugim stosunkiem należy wprowadzić dodatkową ilość żelu do pochwy za pomocą dołączonego do żelu aplikatora.</p>
	<p>2 Niewielkie ilości żelu należy rozprowadzić na krawędzi. Rozprowadzenie żelu na krawędzi diafragmy ułatwi wprowadzenie jej do pochwy.</p>		<p>8 Diafragmę można usunąć z pochwy dopiero po upływie co najmniej <b>6 godzin</b> od ostatniej ejakulacji (w przeciwny razie ruchome plemniki mogą przemieścić się do niechronionego wtedy kanału szyjki macicy).</p>
	<p>3 Diafragmę należy trzymać jedną ręką. Podczas wprowadzania widoczna na niej strzałka powinna być skierowana w kierunku ciała.</p>		<p>9 Następnie diafragmę <b>Caya<sup>®</sup></b> należy wyciągnąć z pochwy za wgłębienie do usuwania.</p>
	<p>4 Diafragmę <b>Caya<sup>®</sup></b> należy wsunąć za część pochwową szyjki macicy do tylnego sklepienia pochwy. Wgłębienie do usuwania powinno wypełniać całkowicie przestrzeń załonową Retziusa.</p>		<p>10 Po wyjęciu diafragmy <b>Caya<sup>®</sup></b> z pochwy należy umyć ją wodą z mydłem i pozostawić do wyschnięcia w otwartym pojemniku.</p>
	<p>5 Diafragma <b>Caya<sup>®</sup></b> jest prawidłowo osadzona, gdy szyjka macicy jest całkowicie przykryta, a diafragma znajduje się między tylnym sklepieniem pochwy a niszą przy kości łonowej.</p>		<p>11 W celu ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, diafragmę <b>Caya<sup>®</sup></b> należy zawsze przechowywać w dołączonym pojemniku.</p>
	<p>6 Po wprowadzeniu należy skontrolować palcem prawidłowe położenie. Jest ono prawidłowe, jeśli przez membranę diafragmy można wyczuć szyjkę macicy (w dotyku podobna do końcówki nosa). W przeciwny razie diafragmę należy wyjąć i ponownie wprowadzić.</p>		<p>12 Ważne: Diafragmy <b>Caya<sup>®</sup></b> nigdy nie należy pozostawiać w pochwie dłużej niż <b>24 godziny</b>.</p>
		<p>13 Diafragmę <b>Caya<sup>®</sup></b> można stosować przez 2 lata od pierwszego użycia.</p>	

# Caya® contoured diaphragm

## dopochwowa barierowa metoda antykoncepcji dla niej



### ZALETY PRODUKTU:

- łatwa do wprowadzania i usuwania
- jeden rozmiar jest odpowiedni dla prawie każdej kobiety
- wygodna i praktyczna dla obojga partnerów

### SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- elastyczny trzon: silikon klasy medycznej o twardości 50 Shore -A durometr
- rdzeń: profilowany, jednoczęściowa sprężyna polimerowa
- długość całkowita: 75 mm
- szerokość całkowita: 67 mm
- membrana: grubość nominalna 0,010"

### WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

#### **Dynamiczne krawędzie**

- układają się w optymalny do wprowadzenia kształt
- osadzają się delikatnie w tkankach podtrzymujących

#### **delikatna dynamika**


- delikatne i łatwe składanie w trakcie wprowadzania i usuwania
- podczas usuwania delikatnie się wysuwa

#### **membrana w kształcie kapturka naszyjkowego**

- rozmiar dopasowujący się do wielu pozycji szyjki macicy
- otacza szyjkę macicy

#### **łuk zwalniający**

- ułatwia wprowadzenie lub raczej korektę pozycji
- zapobiega wywieraniu nacisku na cewkę moczową

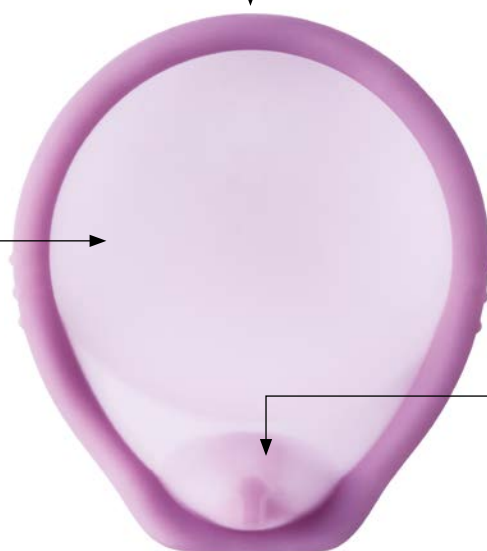

#### **szttywna krawędź wprowadzająca**

- składa się kompaktowo w celu łatwego wprowadzenia
- stabilny kształt podczas wprowadzania
- podtrzymuje kapturek naszyjkowy w sklepieniu tylnym

#### **wypustki do umieszczania**

- ułatwia uchwycenie, gdy diafragma jest śliska
- oznaczenie miejsc zgięcia

#### **wgłębienie do usuwania**

- ułatwia łatwe uchwycenie w celu usunięcia (od góry do dołu)
- ułatwia wprowadzenie i umieszczenie w przedniej części kości łonowej

Każda profilowana diafragma Caya® została indywidualnie skontrolowana pod kątem potencjalnych wad (100% kontroli).  
Produkowana i kontrolowana w Niemczech. Więcej informacji pod adresem: [www.caya.eu/en](http://www.caya.eu/en) lub [www.DiafragmaCaya.pl](http://www.DiafragmaCaya.pl)



KESSEL MEDintim GmbH  
Nordendstr. 82 - 84  
64546 Mörfelden-Walldorf  
Niemcy

Wyłączny importer i autoryzowany przedstawiciel w Polsce:  
AMED  
Ul. Chopina 23/305A  
62-800 Kalisz  
Infolinia: 883 94 94 94  
[www.DiafragmaCaya.pl](http://www.DiafragmaCaya.pl)



Wyrób medyczny  
Wyprodukowano w Niemczech



**MEDintim**  
personal healthcare